


使用说明

OtoAccess[®]

Database

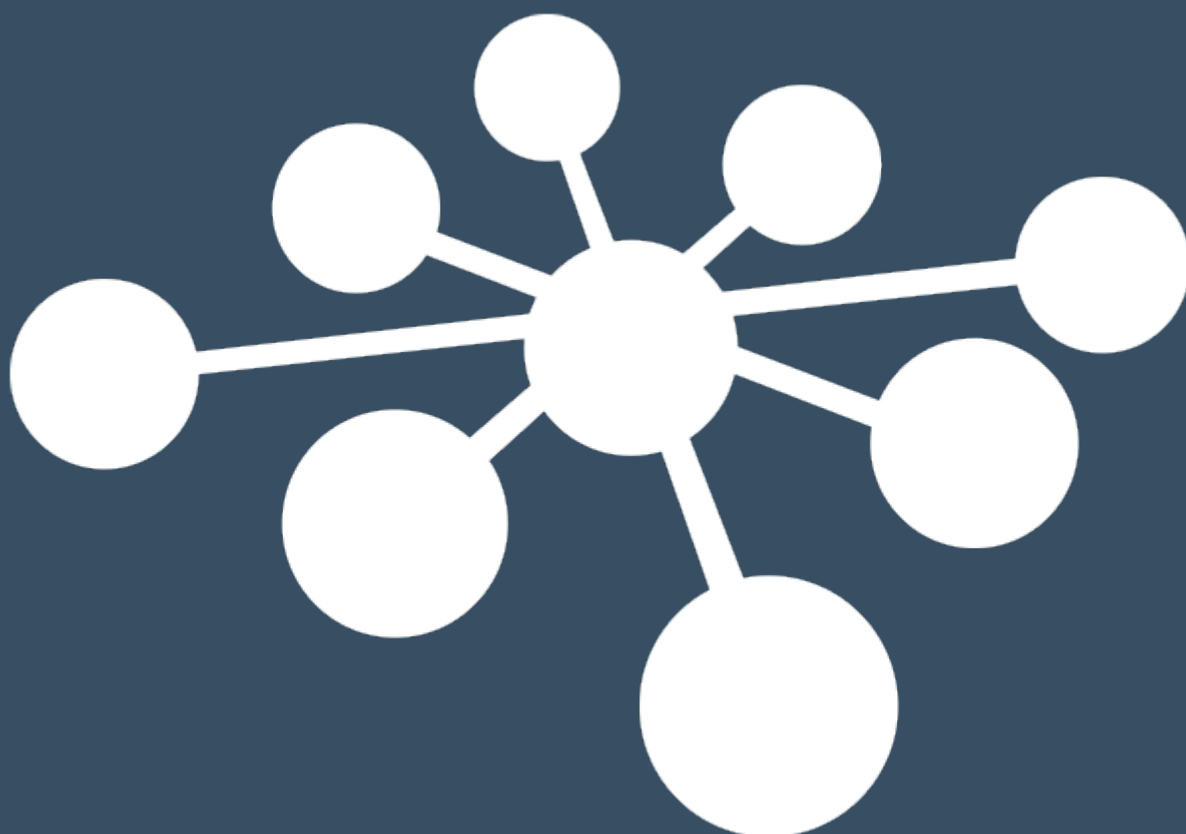

目录

1	介绍	4
1.1	关于本手册	4
1.2	OtoAccess® Database 的预期用途	4
2	注意事项	5
2.1	安全通信	5
2.2	安全存储备份	5
2.3	安全性和数据访问权限	6
2.4	Noah	6
2.5	默认凭证	6
3	硬件和软件要求	7
3.1	.NET Framework	7
3.2	硬盘	7
3.3	监听	7
3.4	内存	7
3.5	处理器速度	7
3.6	操作系统支持	7
3.7	SQL server 支持	7
3.8	使用安全连接	8
4	安装说明	9
4.1	Installation recommendation	9
4.2	设置	9
4.2.1	安装类型	10
4.2.1.1	仅限客户端	11
4.2.1.2	独立安装	11
4.2.1.3	服务器安装	11
4.2.2	管理	12
4.2.3	UAC (用户帐户控制)	12
4.2.4	进度	13
4.2.5	完成	14
4.3	删除产品	15
4.3.1	修改	15
4.3.2	重新安装或更新	15
4.3.3	重新安装产品	15
4.4	网络访问	16
4.4.1	基本连接	16
4.4.2	检查防火墙规则	16
4.4.3	检查服务	17
5	从 OtoAccess® V1.x 到 OtoAccess® Database 的数据迁移	18
6	OtoAccess® Database 用户手册	24
6.1	用户界面	24
6.1.1	菜单栏和工具栏	25
6.1.2	侧面板	26
6.1.3	创建患者和患者列表	27
6.1.4	患者搜索	28



6.1.4.1	扩展的患者搜索功能	30
6.1.4.2	使用语法搜索	31
6.1.5	患者信息	32
6.1.6	会话预览	32
6.1.7	会话列表	33
6.1.8	描述	34
6.1.9	激活许可证	34
6.2	OtoAccess® Database 管理	35
6.2.1	一般设置	36
6.2.1.1	设备信息	36
6.2.1.2	服务管理	36
6.2.1.3	默认首选项	37
6.2.1.4	加强保护患者隐私	37
6.2.1.5	患者字段	38
6.2.1.6	用户自定义的患者字段	39
6.2.2	用户和组	39
6.2.2.1	用户	39
6.2.2.2	组	40
6.2.2.3	用户身份验证	42
6.2.2.4	Microsoft Active Directory	42
6.2.3	数据库	43
6.2.3.1	信息	43
6.2.3.2	连接	43
6.2.3.3	备份和时间设置	44
6.2.3.4	恢复	45
6.2.3.5	日志	45
6.2.3.6	安全日志	45
6.2.3.7	系统日志	46
6.2.3.8	日志保留策略	47
7	Noah 导出	47
7.1	支持的 Noah 版本	47
7.2	功能	47
7.3	Noah 导出许可证订阅	47
7.4	用户界面	47
7.4.1	导出患者和测量数据	48
7.4.1.1	自动查找患者的结果	48
7.4.1.2	将测量数据导出到 Noah	50
7.5	安装和设置	51
7.5.1	在 OtoAccess®数据库客户端中激活 Noah	52
7.5.2	设置 Noah	52
7.5.2.1	Noah Mobile 网络基础设施要求	53
8	故障排除	54
8.1	网络连接问题	54



1 介绍

1.1 关于本手册

本手册适用于 OtoAccess® Database。本产品制造商：

OtoAccess A/S
Audiometer Allé 1
5500 Middelfart
Denmark

感谢您购买 OtoAccess® Database PC 应用程序。OtoAccess® Database 是一个用于轻松管理客户端信息和测试评估的应用程序。OtoAccess® Database 拥有独特的界面，集成了来自不同制造商的听力模块。

OtoAccess® Database 可以通过以下三种方式进行设置：

- OtoAccess® Database 服务器和网络客户端
- OtoAccess® Database 网络客户端
- OtoAccess® Database 独立

免责声明：本手册中使用的所有数据都是随机生成的演示数据。

1.2 OtoAccess® Database 的预期用途

OtoAccess® Database 用于为患者信息和评估数据提供全面的数据管理工具。

OtoAccess® Database 提供了一种无缝、快速的方式来添加客户、启动测量模块并在评估客户之后将数据安全地存储在数据库中。



2 注意事项

为避免在网络传输过程中客户端信息遭到泄露，与 SQL 数据库的通信必须受到保护（加密）。

以安全的方式存储客户端数据的备份。

定期（例如每周一次）创建患者数据的备份。

为避免数据被滥用（例如被盗），必须对数据进行加密。

为避免未授权的 PC 到网络的数据传输，请确保安装了有效的病毒和间谍软件扫描程序，并对其进行定期更新；请联系您当地的管理员寻求帮助和指导。

所有用户必须拥有自己的数据库登录名，以确保可以跟踪和识别从数据库更新或删除的数据。

2.1 安全通信

OtoAccess® Database 可以安装为客户端服务器环境，在该环境中，数据库的数据通过网络传输。

为了确保在传输过程中患者信息不遭到泄露，与 SQL 数据库的通信必须受到保护（加密）。

必须在 SQL 服务器上设置安全通信，因为 OtoAccess 数据库不能自动完成。

2.2 安全存储备份

OtoAccess® Database 自动创建每个数据库的备份，备份的时间和保留期限可根据临床医生的需求和偏好进行自定义。

为确保数据不会丢失（例如，在硬件发生故障时），必须将备份复制到第二个安全位置。

为确保数据不被滥用，我们建议将备份存储在加密卷上或用密码进行保护。



2.3 安全性和数据访问权限

默认情况下，所有用户必须拥有自己的登录名。所有会话的存储都与每位用户相关联，系统会记录每位用户的所有操作。

如果共享登录名或禁用密码，则会显著降低安全性和日志记录效率。

仅依靠 Windows 登录来提供安全性，可以更轻松/更快地访问数据库。这需要系统管理员关联用户的安全凭证。注意：这不适用于活动目录，完全需要登录 Windows 的用户自行完成。

在三次登录尝试失败后，系统会默认注销用户 10 分钟。

系统允许用户更改密码并加强密码强度。

默认情况下，密码不会过期。

2.4 Noah

虽然 Noah Mobile 的身份验证过程允许在 Web 浏览器中自动填充用户名 - 密码，但我们建议不要使用自动填充功能。自动填充会使用用户名和密码容易受到攻击，登录到 OtoAccess 数据库的任何人都可以使用这些数据。

2.5 默认凭证

首次启动 OtoAccess® Database 时，系统将提示您输入默认用户名和密码。

用户名: **admin**

密码: **password**

如果需要限制应用程序的访问权限，请确保更改管理员帐户的密码。



3 硬件和软件要求

3.1 .NET Framework

需要 .NET 4.5 才能运行应用程序。

3.2 硬盘

磁盘空间要求因安装选项而异。

仅客户端安装：建议至少有 5Gb 的可用磁盘空间。

独立安装：建议至少有 30Gb 的可用磁盘空间。

服务器安装：建议至少有 30Gb 的可用磁盘空间。

如果使用不受限的 SQL 服务器版本，可用磁盘空间必须能体现出预期使用情况。

3.3 监听

支持的最小分辨率为 WXGA（1280x768）。

建议在全高清 1920x1080 或更高分辨率的显示器上运行 OtoAccess®。

3.4 内存

单机版：建议至少 8GB 内存。

客户端：建议至少 4GB 内存。

服务器：建议至少 16GB 内存。

3.5 处理器速度

单机版或客户端：建议至少是 Intel i5-6th gen.或 AMD Ryzen 3 1300。

服务器：建议至少是 Intel i7-6700 或 AMD Ryzen 7 1700 或等效产品。

3.6 操作系统支持

Windows 10 1703 版或更高版本

Windows 11

Windows Server 2016 1709 版或更高版本

Windows Server 2019

Windows Server 2022

执行安装需要本地或域管理员账户。

注意：OtoAccess 数据库服务器、单机版和客户端需要 64 位操作系统。

3.7 SQL server 支持

OtoAccess 数据库 2.4 版作为标准与 SQL 2019 Express 服务器一起安装。SQL Express 被 Microsoft 设置了 10Gb 限制。

OtoAccess 数据库支持无大小限制的非快速 SQL 服务器。



OtoAccess® 数据库将在以下版本的 Microsoft SQL Server 上运行:

SQL Server 2014 (SP1 - SP2)

SQL Server 2016

SQL Server 2017

SQL Server 2019 (2.3 版 OtoAccess 数据库默认为 Express 版本)

SQL Server 2022

注意: OtoAccess® 数据库要求启用服务代理并将相应的防火墙规则设置为允许访问。

3.8 使用安全连接

使用安全网络连接需要在 SQL Server 上安装证书。

有关更多信息, 请参阅: <https://learn.microsoft.com/en-us/sql/database-engine/configure-windows/configure-sql-server-encryption?redirectedfrom=MSDN&view=sql-server-ver15>



4 安装说明

4.1 Installation recommendation


为确保保留数据和客户端正常运行，建议在服务器和客户端配置中安装 OtoAccess 数据库。

建议始终将临床工作站作为与 OtoAccess 数据库服务器连接的客户端运行。

OtoAccess 数据库服务器应使用没有大小限制的 Microsoft SQL 服务器许可证，但需单独购买。该许可证安装在与 OtoAccess 数据库服务器相同的服务器上，或者使用统一的 SQL 设置。

4.2 设置

从安装文件中运行 OtoAccess.exe

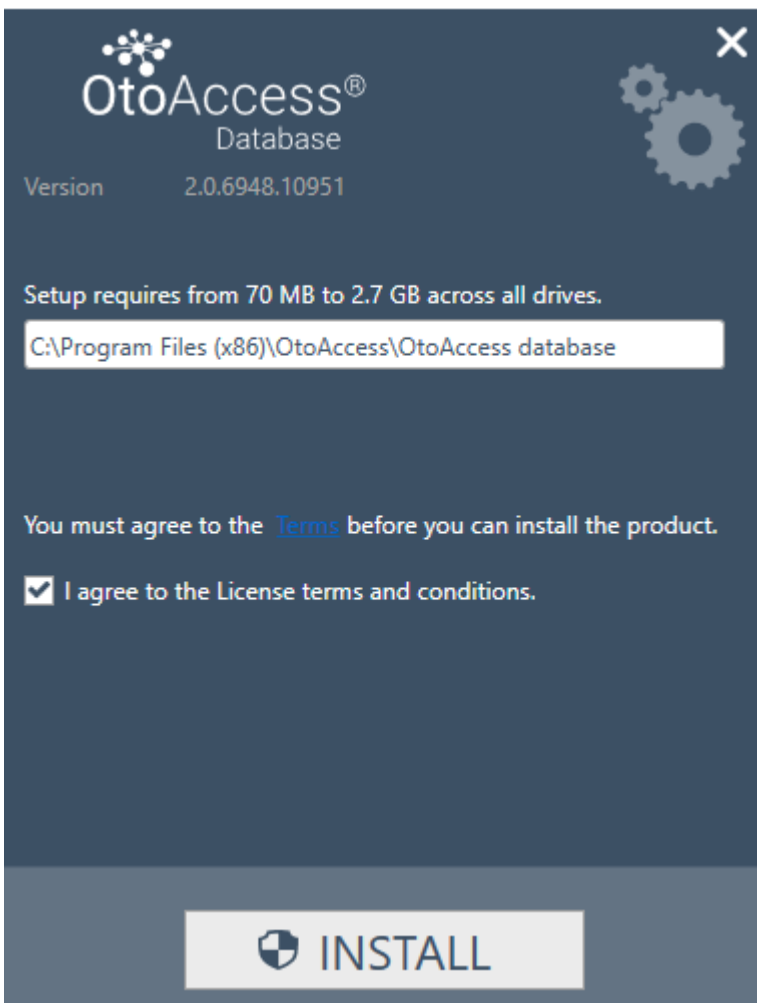


在继续安装前，请仔细阅读许可协议并勾选“我同意”。

注意：如果您不同意许可条款，请按右上角的“X”，这将退出应用程序。




4.2.1 安装类型

OtoAccess® Database 可以独立安装，也可以安装在一个网络环境中，使多个客户端能够访问同一数据库。

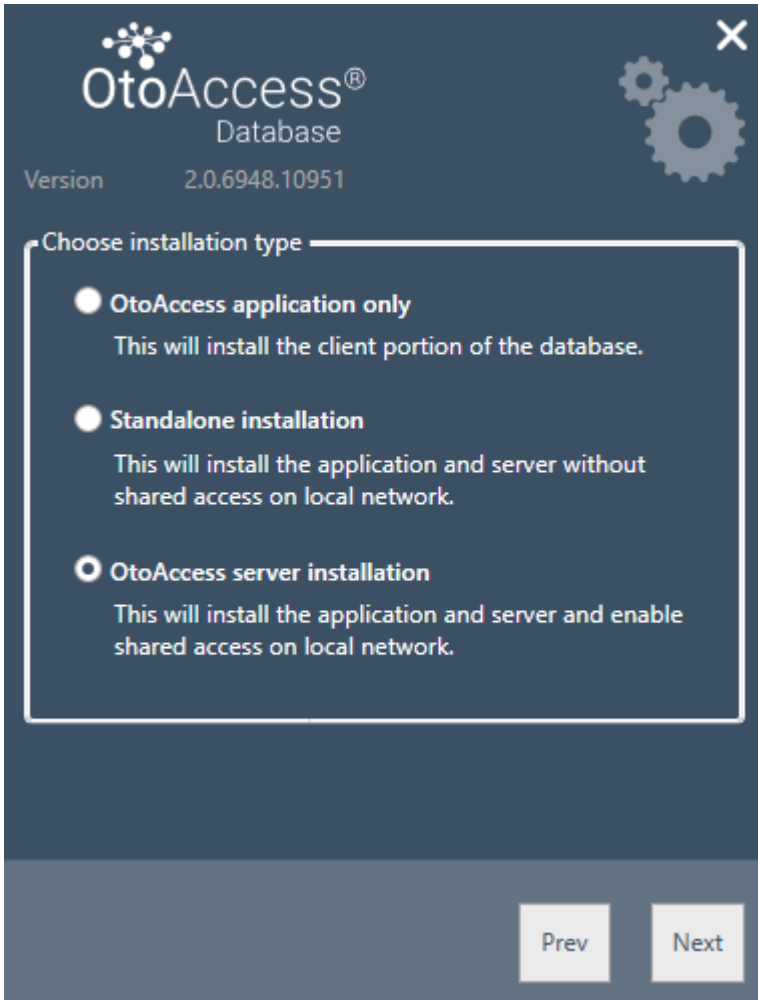

4.2.1.1 仅限客户端

如果已安装服务器并计划在多个客户端之间使用相同的数据库，请选择此类型。

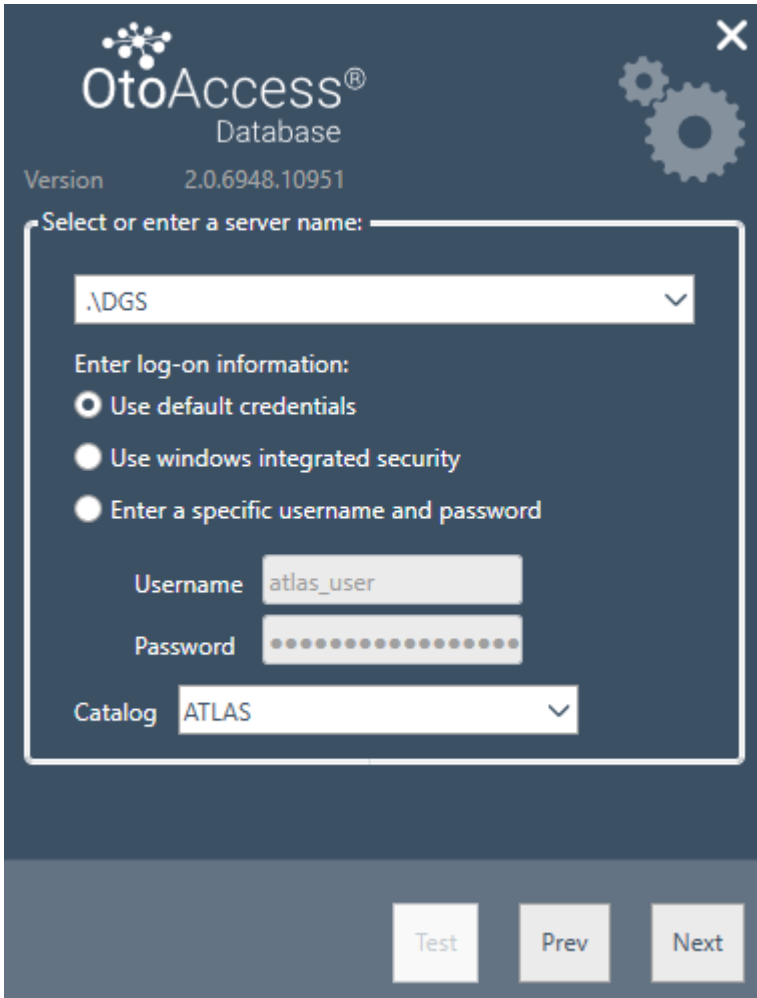

客户端安装允许用户设置与网络服务器的连接。

按以下格式输入服务器名称和实例名称：

[服务器名称] \ [实例名称]

选择使用默认的 OtoAccess® Database 凭证或指定 Windows 或其他特定凭证。

目录/数据库名称 ATLAS 是默认名称，但可以在提供凭证的情况下从服务器中选择。

4.2.1.2 独立安装

如果您计划在本地计算机上使用该应用程序并且不希望共享数据库的访问权限，请选择此安装类型。

注意：如果系统上已存在 SQL Server 2014 Express，将升级到 SQL 2019 Express，则安装将重新使用它并沿用先前安装实例的设置，即选择服务器版或独立安装版将不会对现有服务器配置产生任何影响。

OtoAccess 数据库 Atlas 也将升级到 SQL 2019。

4.2.1.3 服务器安装

如果想要设置与其他客户端共享的数据库，请选择此安装类型。




注意：如果系统中已存在 SQL 服务器，而不是 SQL Server 2014，则安装将继续使用该服务器并沿用先前安装实例的设置，即选择服务器版或独立安装版将不会对现有服务器配置产生任何影响。

如果存在 SQL 2014 Express，该系统将升级到 SQL 2019 Express。

4.2.2 管理

管理工具是可选项，但在进行系统管理时（如添加用户检查日志、进行备份等）需要。

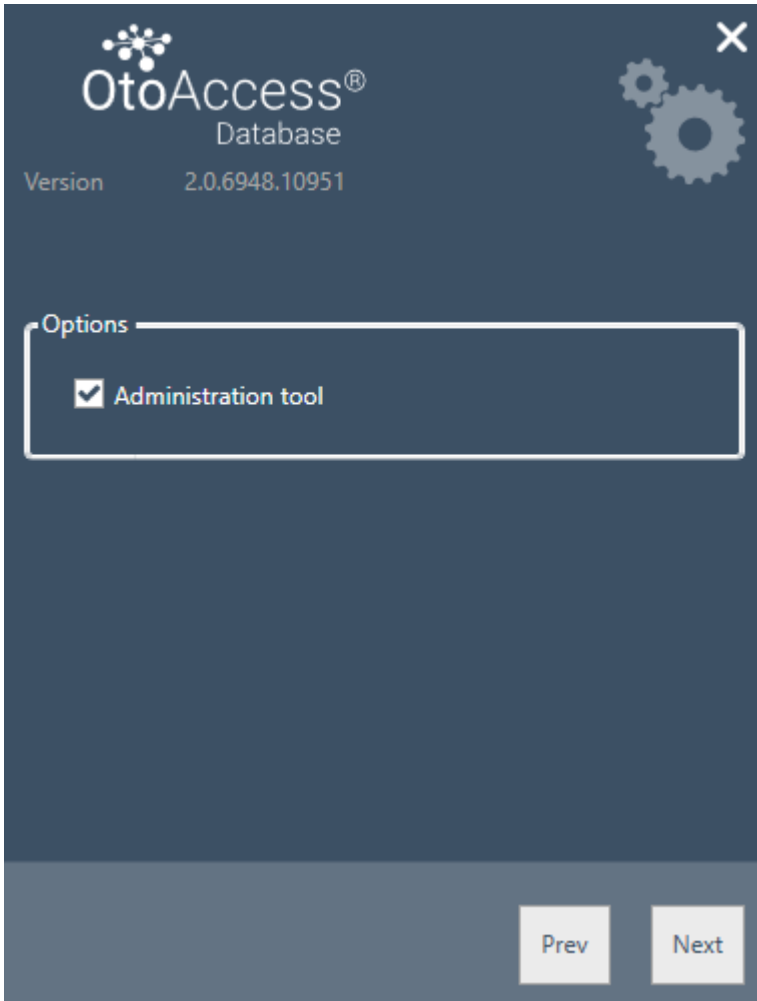

4.2.3 UAC（用户帐户控制）

选择管理选项后按下“下一步”时，安装程序将提示用户选择允许访问系统。

选择“否”将中止安装。




4.2.4 进度

在安装过程中，安装程序将安装 .NET Framework，SQL Server 和应用程序。


安装的持续时间取决于现有组件以及安装选择的版本。

下面列出了每个组件的预期持续时间：

- 1) .NET 4.5 Framework 约需 4 分钟（可能需要重启）
.NET Framework 预装在 Windows 8 和更新的操作系统上。
- 2) SQL Server 约需 12 分钟（可能需要重启）
- 3) OtoAccess® Database 应用程序约需 2 分钟

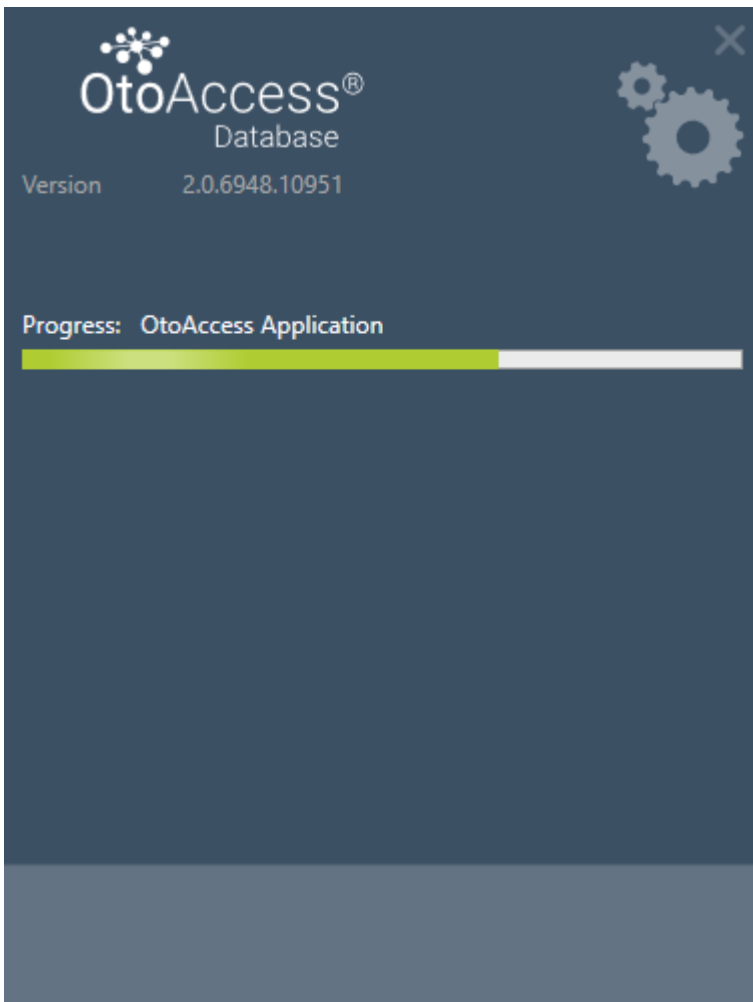

4.2.5 完成

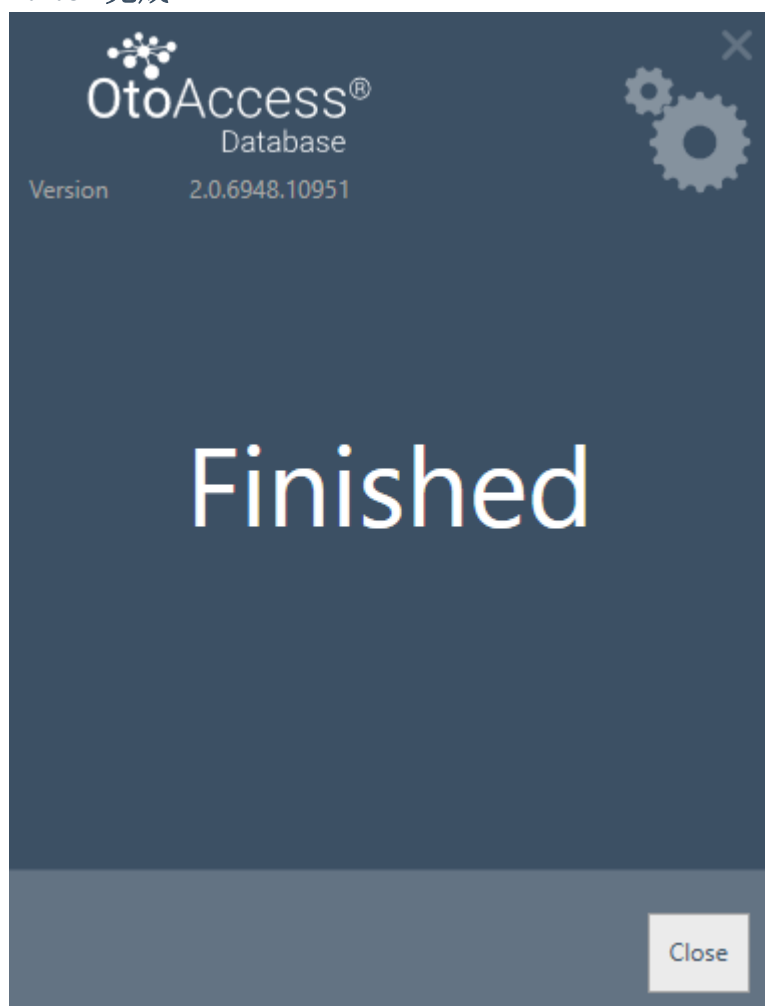


4.3 删除产品

要删除产品，请从“程序和功能”中找到 OtoAccess® Database，然后选择“卸载”。

删除产品将卸载 OtoAccess® Database 应用程序，但会保留 SQL Server 和 .NET framework 等共享组件以及数据库和所有用户生成的文件。

要删除 SQL Server，请从“程序和功能”中将其卸载。

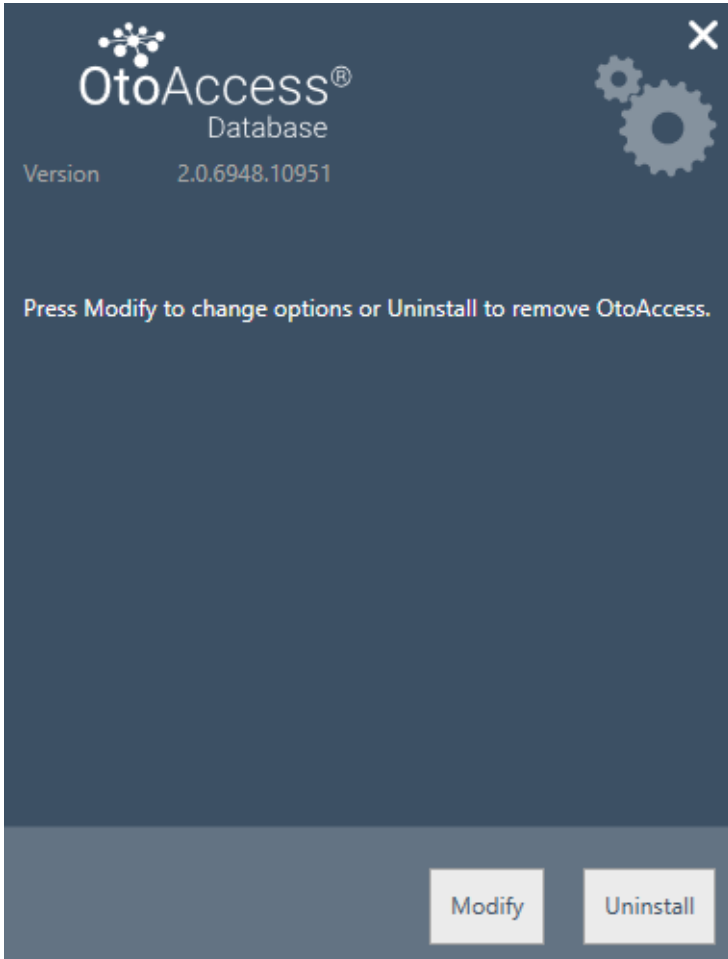

4.3.1 修改

要修改安装，请点击“修改”。这将允许用户在安装中添加或删除管理。

4.3.2 重新安装或更新

要重新安装产品，请从安装文件中启动 OtoAccess.exe。如果产品事先未卸载，安装程序将中止。

请在重新安装或更新之前先行备份。

（独立安装或服务器版安装）。安装程序将检测是否存在 SQL 数据库并在创建新的空白数据库之前执行备份。

请选择使用现有数据库来保留现有患者和测试数据。如果选择新数据库，现有数据将被删除。

4.3.3 重新安装产品

要重新安装产品，请从安装文件中启动 OtoAccess.exe。如果产品事先未卸载，安装程序将中止。



（独立安装或服务器版安装）。安装程序将检测任何现有 SQL 数据库并在创建新的空白数据库之前执行备份。

4.4 网络访问

默认情况下，服务器安装将在网络上宣告自己的身份，并让其他客户端连接到计算机。


要诊断和排除服务器上的问题，可以使用以下提示：

4.4.1 基本连接

请确保客户端和服务器之间的基本连接。

按 Windows + R，输入 CMD

在命令提示符下输入 ping [计算机名称]

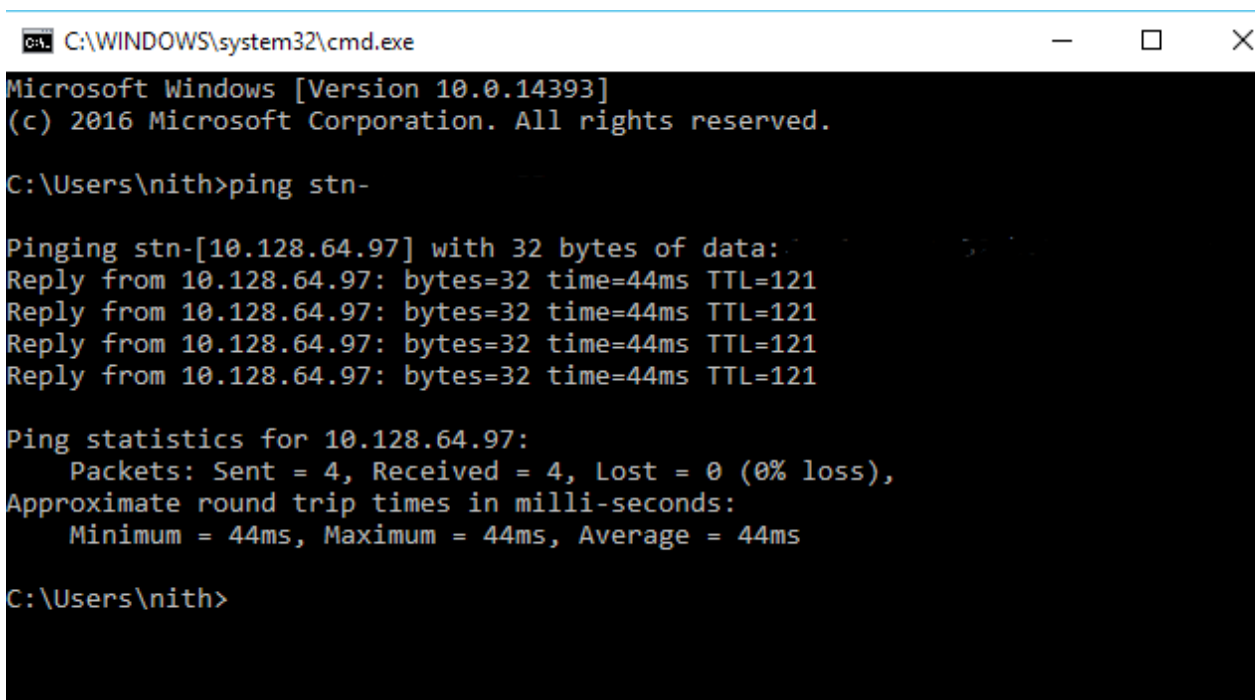

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [Version 10.0.14393]
(c) 2016 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\nith>ping stn-

Pinging stn-[10.128.64.97] with 32 bytes of data:
Reply from 10.128.64.97: bytes=32 time=44ms TTL=121
Reply from 10.128.64.97: bytes=32 time=44ms TTL=121
Reply from 10.128.64.97: bytes=32 time=44ms TTL=121
Reply from 10.128.64.97: bytes=32 time=44ms TTL=121

Ping statistics for 10.128.64.97:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 44ms, Maximum = 44ms, Average = 44ms

C:\Users\nith>
```

4.4.2 检查防火墙规则

确保防火墙允许访问 SQL Server：

按 Windows + R，输入 firewall.cpl

通过 Windows 防火墙选择允许应用程序或功能。

选择允许其他应用……

浏览要通过防火墙允许的 SQL Server 实例的位置，例如 C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL13.<实例_名称>\MSSQL\Binn，选择 sqlservr.exe 并单击“打开”。

单击确定。

对此位置的 SQL 浏览器服务执行相同的操作：



C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\90\Shared\sqlbrowser.exe

端口和协议列表:

UDP 1434 (SQL 浏览器服务)

TCP 1433 (SQL 默认实例)

TCP * (SQL Server 命名实例 - 端口在服务开始时确定)

TCP 4022 (服务代理)

有关更多信息, 请访问: <https://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc646023.aspx>

4.4.3 检查服务

确保所有相关服务都在运行。

按 Windows + R, 输入 services.msc

必须运行以下服务:

OtoAccess® Database 服务

SQL Server (DGS)

SQL Server 浏览器

使用 SQL Management Studio, 检查以下服务:


```
SELECT is_broker_enabled FROM sys.databases WHERE name = 'ATLAS';
```



5 从 OtoAccess® V1.x 到 OtoAccess® Database 的数据迁移

如果现有的 OtoAccess® V1.x 数据需要与 OtoAccess® Database 一起使用，则这是安装 OtoAccess® Database 后的第一步。（OtoAccess® Database 是 OtoAccess® V1.x 的替代品）

1. 导航到 OtoAccess® Database 安装文件夹并运行 Merge.exe
(例如，X64 计算机上的默认安装文件夹为 C:\Program Files (x86)\OtoAccess\Atlas)
2. 将出现 OtoAccess® Database 合并软件。

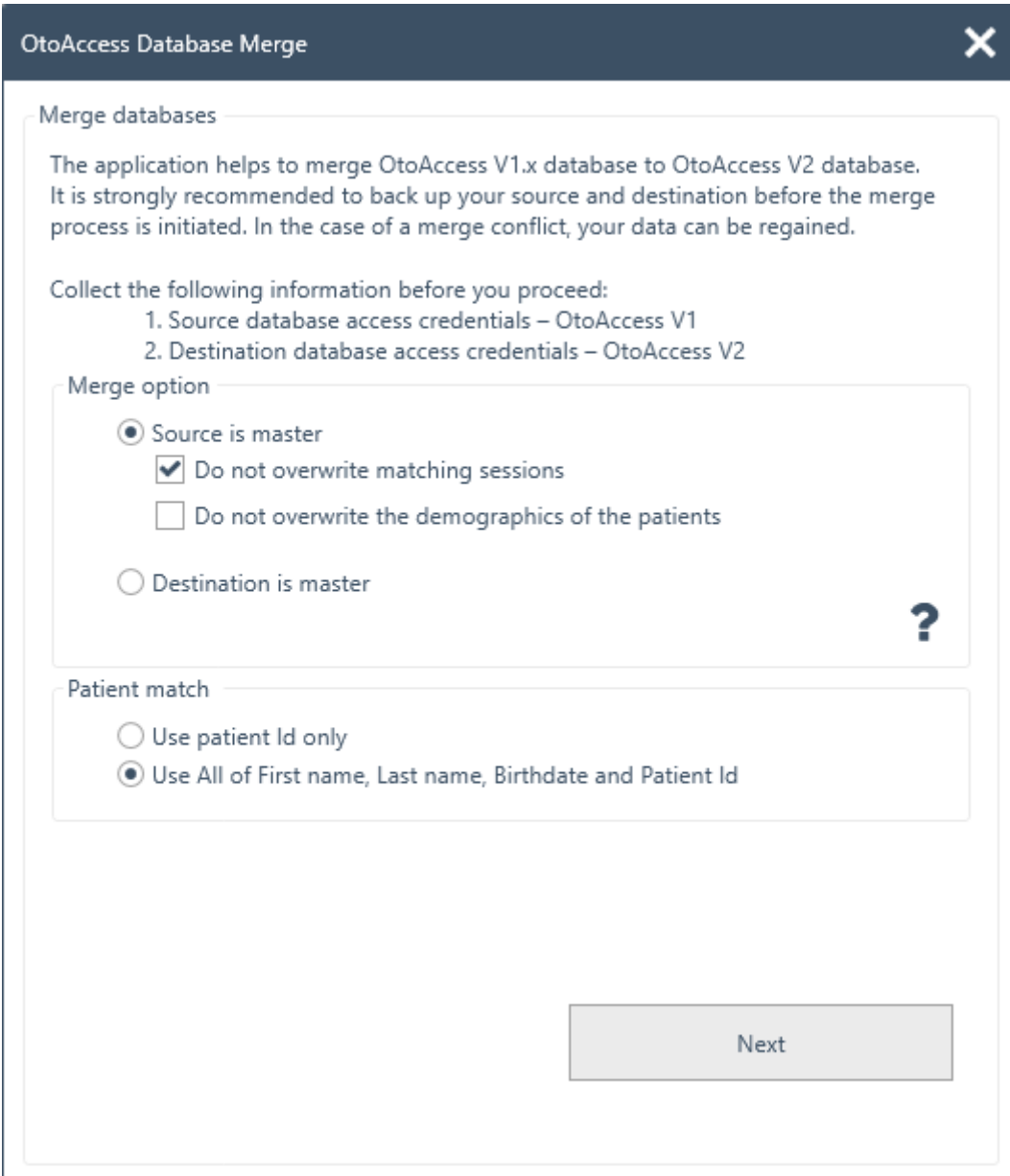

OtoAccess Database Merge

Merge databases

The application helps to merge OtoAccess V1.x database to OtoAccess V2 database. It is strongly recommended to back up your source and destination before the merge process is initiated. In the case of a merge conflict, your data can be regained.

Collect the following information before you proceed:

1. Source database access credentials – OtoAccess V1
2. Destination database access credentials – OtoAccess V2

Merge option

Source is master

Do not overwrite matching sessions

Do not overwrite the demographics of the patients

Destination is master

Patient match

Use patient Id only


Use All of First name, Last name, Birthdate and Patient Id

Next



3. 合并应用程序将提示后续的步骤。仔细阅读每一步，并为合并操作选择正确的合并选项。
 - 源是主站 - OtoAccess® V1.x 是合并操作的主站
 - 将新患者和会话复制到目标数据库
 - 覆盖目标数据库中的现有患者和会话
 - 如果不想覆盖目标数据库中患者的会话，请选择“不覆盖匹配会话”选项
 - 如果不想覆盖目标数据库中患者的患者信息，请选择“不覆盖患者的信息”选项
 - 目标数据库是主站 - OtoAccess® Database是合并操作的主站
 - 跳过将新患者和会话复制到目标数据库
 - 跳过覆盖目标数据库中的现有患者和会话
 - 如果发现患者匹配，则仅复制新的患者会话
4. 其他数据会发生什么？
 - 机构（门诊）
 - 如果目标数据库具有默认安装数据，则它将被源数据库数据覆盖
 - 如果目标数据库名称与源数据库名称相匹配，则它将被源数据库数据覆盖。（当源数据库为主时）
 - 用户/检查员
 - 所有新用户/检查员都会被复制到目标数据库。跳过覆盖现有用户/检查员数据。名字、姓氏和姓名缩写的组合用于标识用户/检查员
5. 患者匹配。
选择是将患者标识为源还是目标。
6. 单击下一步。
7. 提供源数据库（OtoAccess® V1.x）访问凭证。确保连接已被测试并且连接成功。窗口顶部显示了连接状态。默认值提供了对本地 OtoAccess® V1.x 的访问凭证。



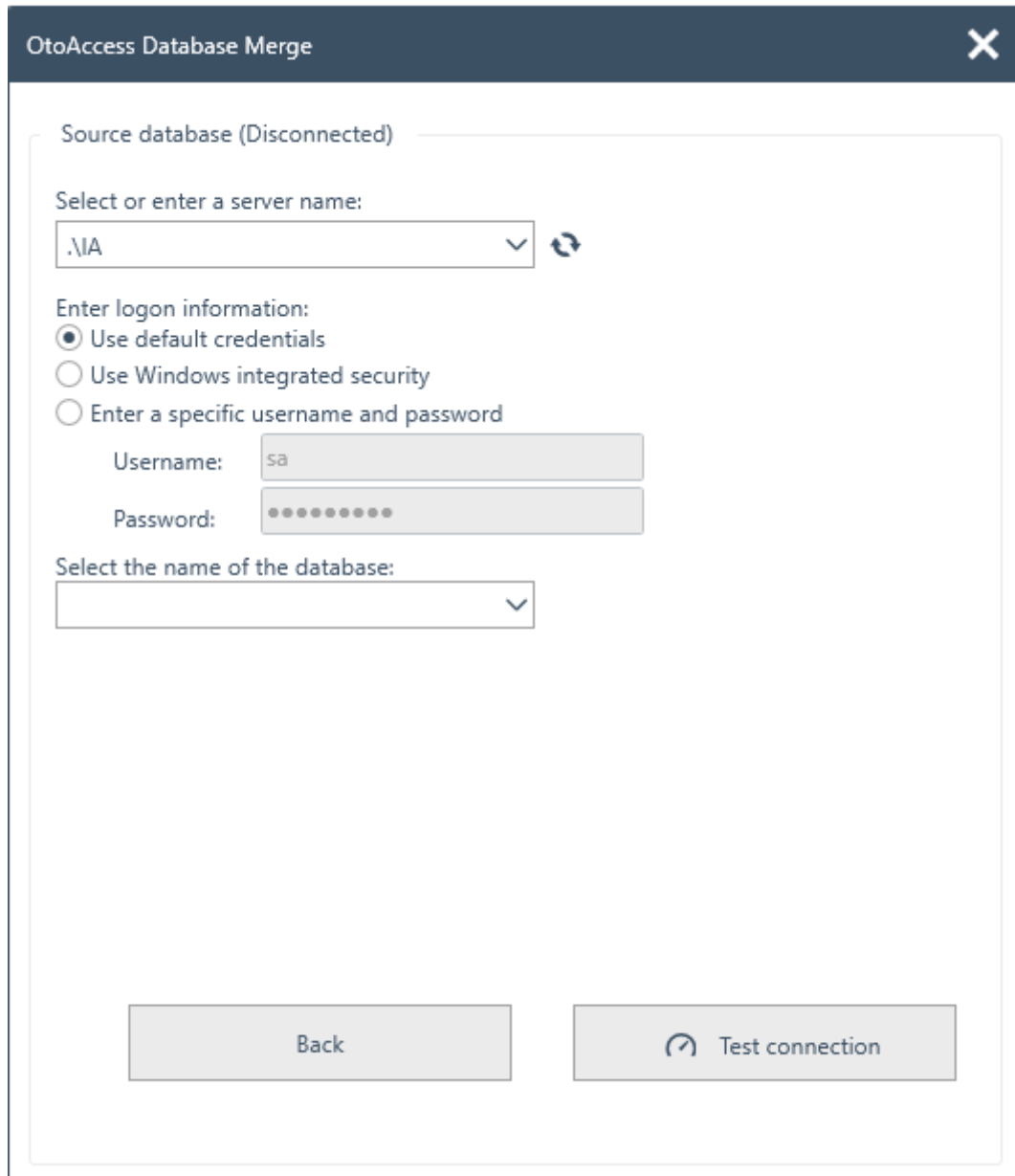

OtoAccess Database Merge

Source database (Disconnected)

Select or enter a server name:

.\IA

Enter logon information:

Use default credentials

Use Windows integrated security

Enter a specific username and password

Username: sa


Password:

Select the name of the database:

Back Test connection

- 单击测试连接，然后单击下一步。
- 提供目标数据库（OtoAccess® Database）访问凭证。确保连接已被测试并且连接成功。窗口顶部显示了连接状态。默认值提供了对本地 OtoAccess® Database 的访问凭证。




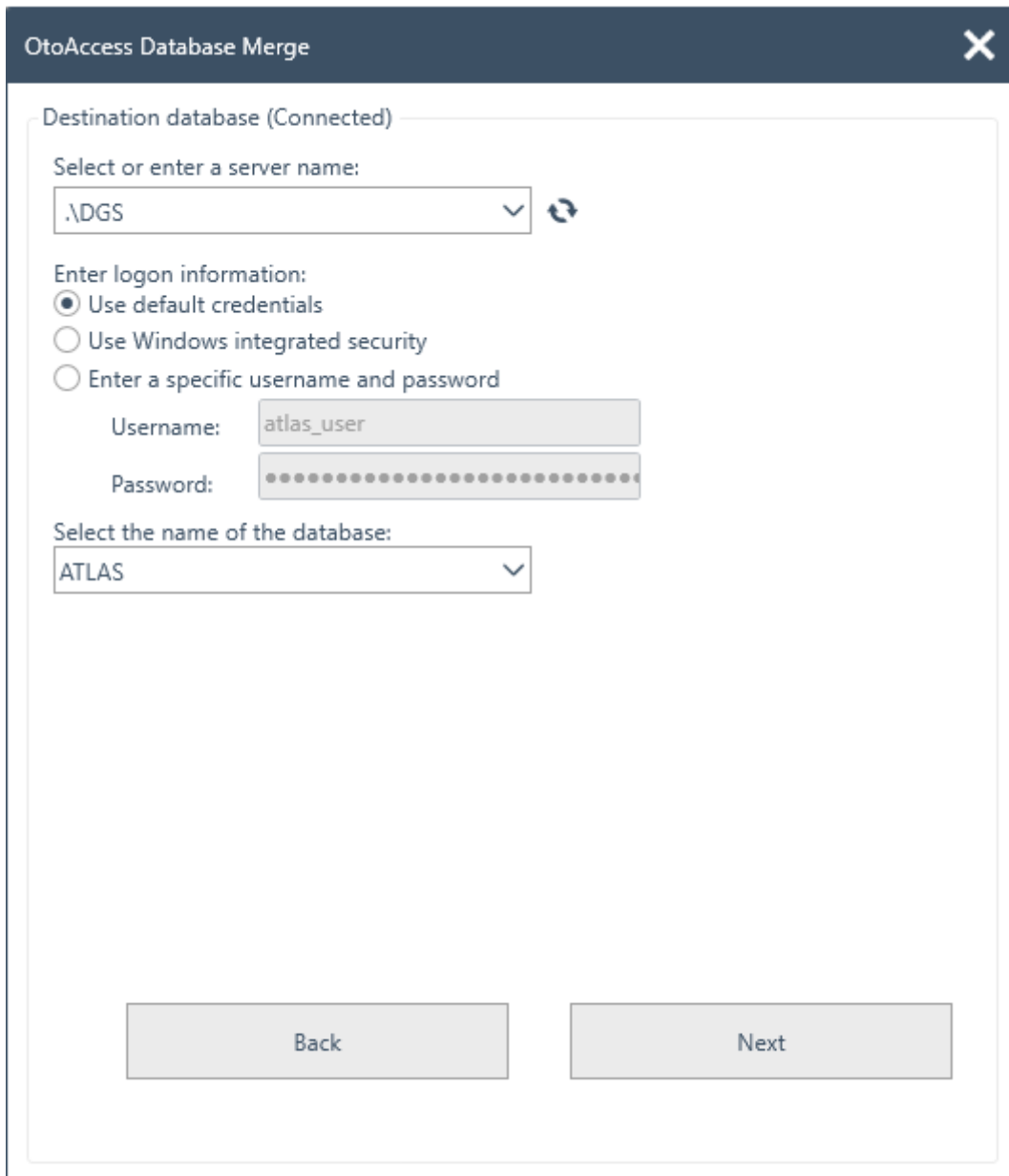

10. 单击测试连接，然后单击下一步。


11. 已准备进行合并操作。单击“合并”按钮。请耐心等待，直到数据库合并操作完成。进度条显示了进度状态。合并进度状态有“未启动”、“已启动”和“完成”。



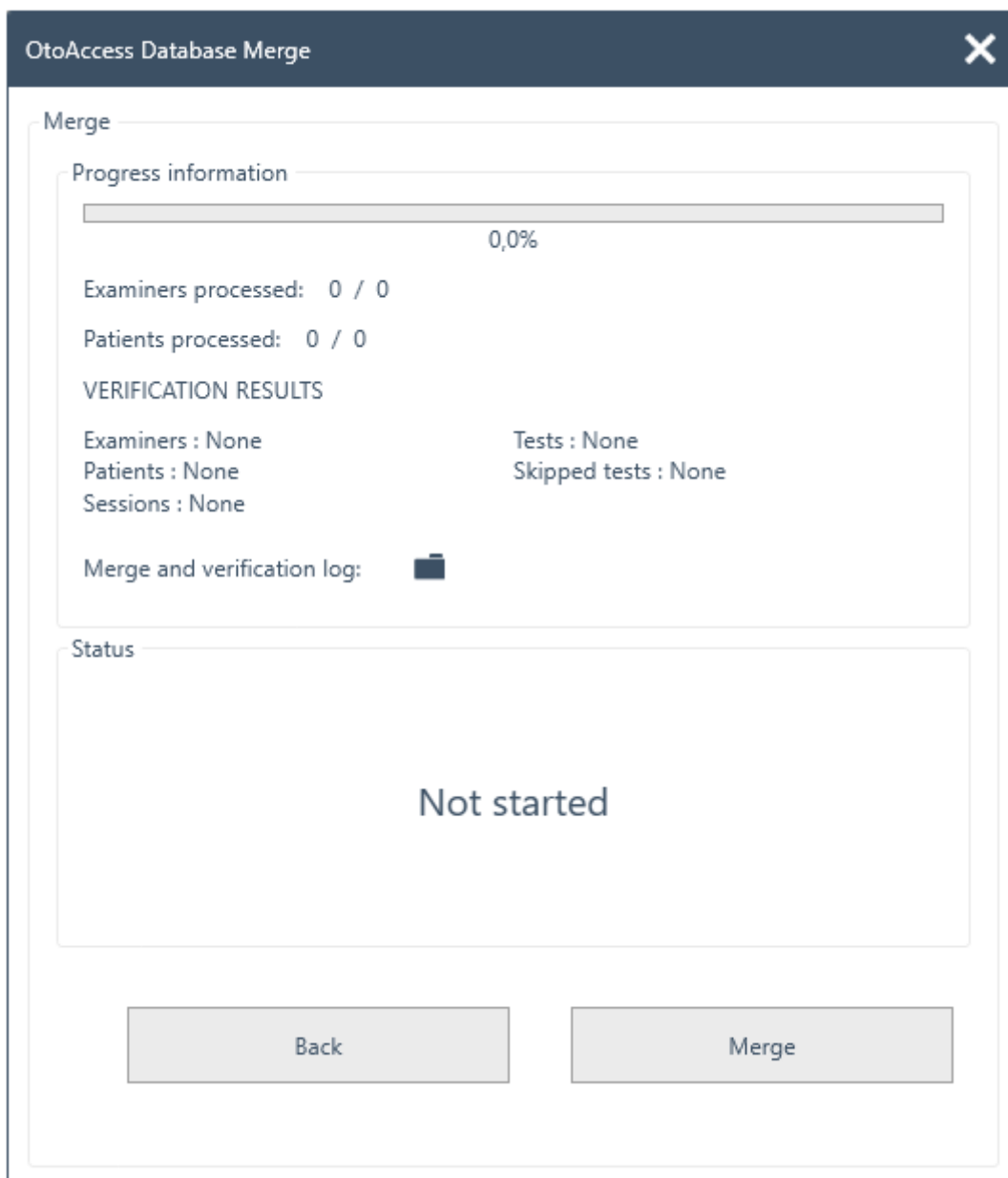

12. 当进度状态为 100% 且合并进度状态为“完成”时，即表示合并操作完成。
13. 仔细分析显示在上面窗口中的已处理检查员、已处理患者和验证结果。如果有任何“失败”，则会显示失败状态，以便分析合并日志详细信息。单击文件夹图标可以打开合并日志。



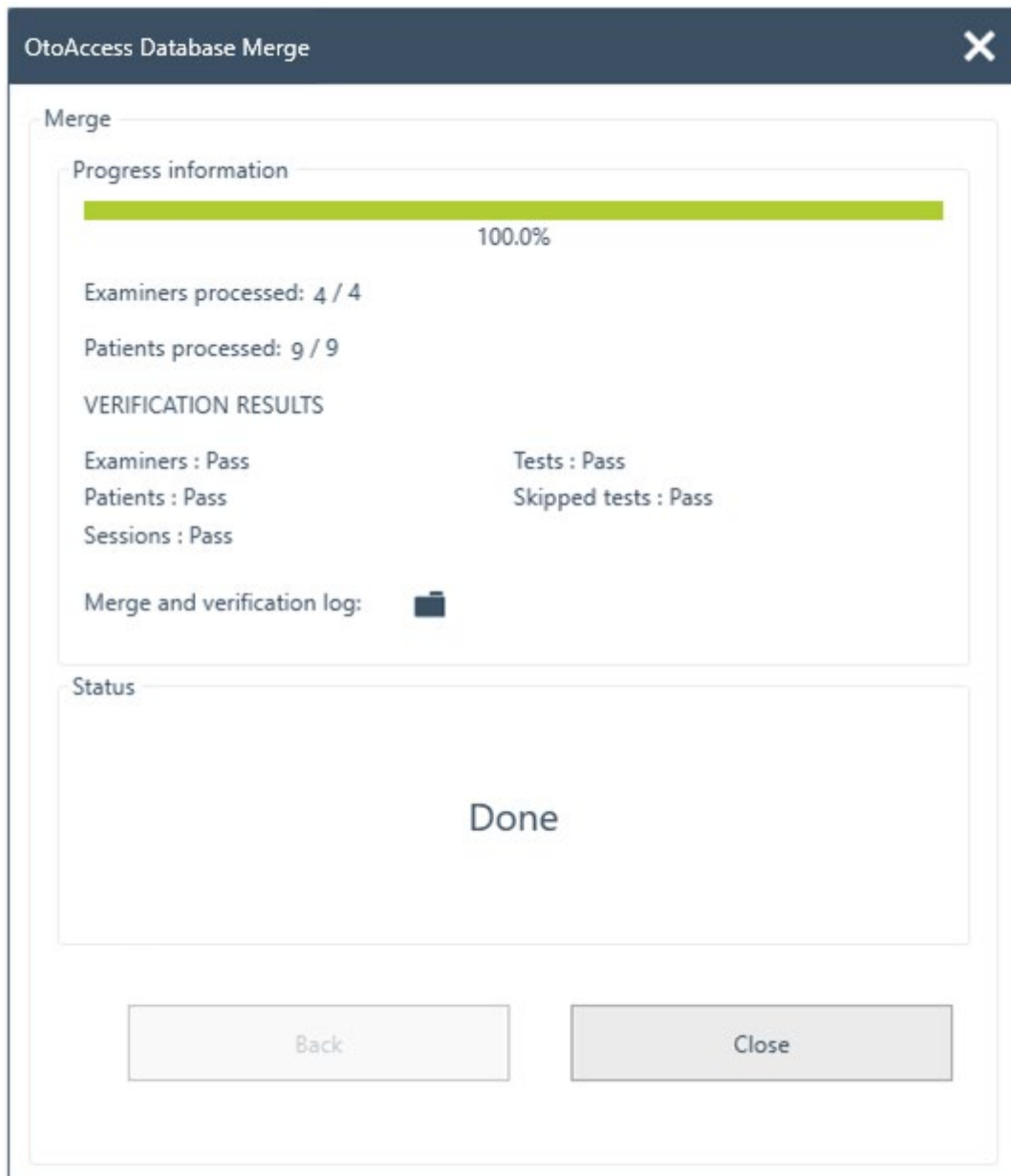


如果状态在最后显示“已停止”，请检查合并和验证日志以获取更多信息。



6 OtoAccess® Database 用户手册

6.1 用户界面

主屏幕包括菜单栏、工具栏、侧面板、患者列表、患者信息、会话列表和信息栏。

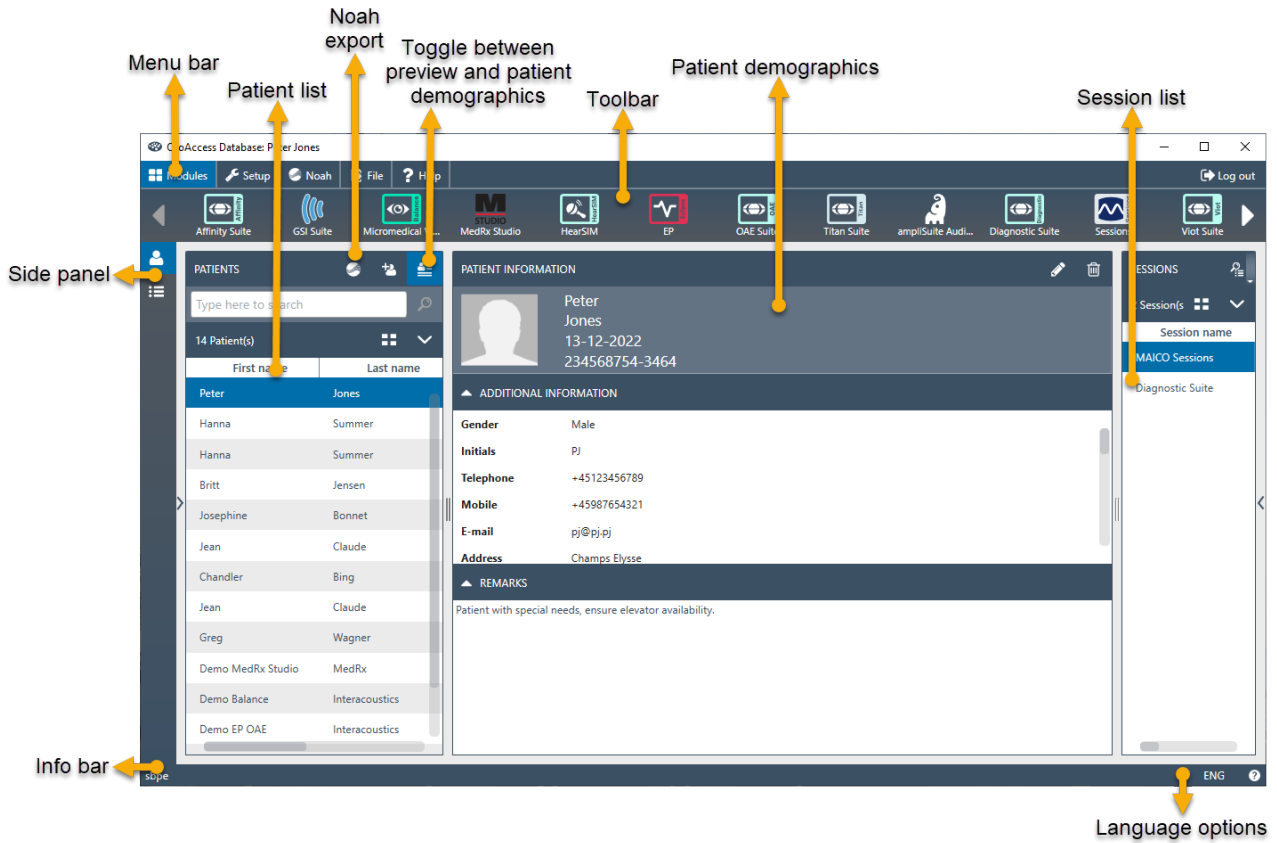


在菜单栏中，可以找到帮助图标 。选择此按钮可打开手册。


在信息栏的最右侧，您可以更改语言。选择缩写 **ENG** 可显示选项的下拉列表。如果选择新语言，则需要重新启动 OtoAccess® Database 以使语言更改生效。




6.1.1 菜单栏和工具栏

菜单栏包含以下项目：模块、设置、文件和帮助。工具栏项目根据所选菜单项而变化。您可以从这些工具栏选项中选择所需的功能。
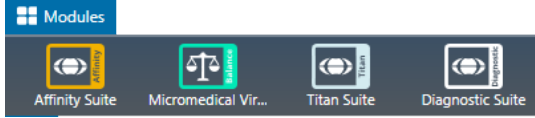
<p>模块</p> 	<p>在“模块”菜单下，工具栏显示了已安装的模块。选中一个模块以启动。</p>
--	---
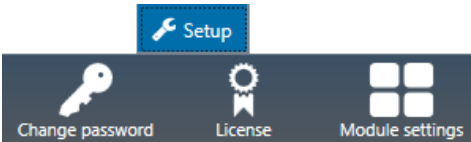
<p>设置</p> 	<p>设置菜单选项用于：更改当前用户的密码；查看/更新许可证；显示/隐藏模块。</p> <p>要创建新密码，请选择更改密码。然后会出现以下弹出窗口：</p> <div data-bbox="963 931 1267 1402" style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <p style="text-align: center; background-color: #333; color: white; padding: 2px 5px;">CHANGE PASSWORD</p> <p>Old password <input type="text"/></p> <p>New password <input type="text"/></p> <p>Confirm password <input type="text"/></p> <p style="text-align: center; margin-top: 10px;"> <input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Cancel"/> </p> </div> <p>首先，输入您的旧密码。然后输入新密码并在第三个文本字段中重新输入此新密码，以确认密码更改。选择确定确认更改，选择取消取消更改。</p>
--	--

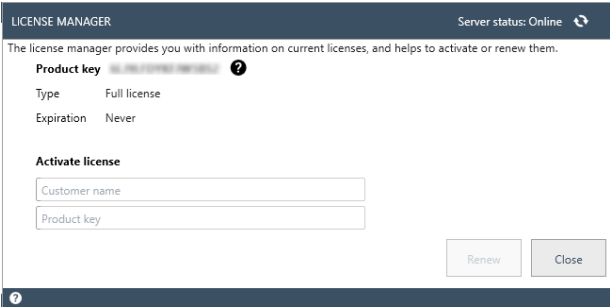	<p>选择许可证将显示许可证管理器，您可以在其中查看当前有效的许可证和/或激活新的许可证密钥。输入新密钥后，选择验证验证密钥并激活许可证。</p> <p>如果有效许可证处于活动状态，Activate License（激活许可证）按钮将显示 Check license（查看许可证），使您可以查看许可证状态并激活更新的功能。</p>
---	---





	<p>选择模块设置访问有关所安装模块的一些有用信息，例如版本号、制造商名称和安装文件的位置。</p> <p>此外，您可以将每个模块设置为是否激活或可见。</p>
---	---

<p>文件</p> 	<p>选择文件将在工具栏中显示以下两个选项：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 导入患者： 导入患者文件 • 导出患者： 导出包含患者数据和会话的文件。请注意，必须先选择患者，然后才能使用导出按钮 <p>选择导出功能后，将出现一个弹出窗口，用于选择文件名和位置。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 如果要患者导出为加密文件，请选择 *.Oto。此文件只能在 OtoAccess® Database 应用程序中使用 • 如果需要公共文件，请选择 *.xml 或 ‘.json
--	---

<p>帮助</p> 	<p>在帮助菜单中，您可以找到有关 OtoAccess® Database 的用户指南和版本信息。</p>
--	--

6.1.2 侧面板

在侧面板中，可以选择患者  或会话  类别。患者视图显示了患者列表和每位患者的会话。会话视图显示了数据库中所有患者的整个会话列表。



6.1.3 创建患者和患者列表

患者列表显示了 OtoAccess® Database 中创建的患者。从这里可以添加新患者、修改数据和搜索患者。

1. 添加新患者。
2. 在详细的患者信息和详细的会话信息之间切换。
3. 搜索字段。
4. 在网格视图和组合视图之间切换患者详细信息。
5. 选择要查看的患者字段。
6. 排序。

选择网格视图按钮 将以网格格式显示患者所有信息。

Patient Id	First name	Last name	Birth date	Gender
------------	------------	-----------	------------	--------


选择组合视图按钮 将以一块区域显示患者所有数据。此视图禁用该功能，以便根据特定字段（如姓氏或名字）进行排序。

Patient Id	270997-1219
First name	Steve
Last name	Nilsson
Birth date	27-07-1997
Gender	Male
E-mail	

选择列表视图图标旁边的向下箭头 以更改列表中显示的字段。将出现一个下拉列表，其中列出了所有项目。前面有勾号的项目包含在患者列表中。

First name	✓
Last name	✓
Session name	✓
Create date	✓
Update date	✓
Examiner	✓
Module	✓

要搜索患者，请使用患者列表上方的搜索框。搜索项目可以是人员 ID、姓氏、名字和出生日期。

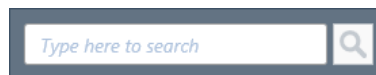


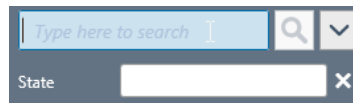
在搜索字段中输入搜索字符，然后按 **Enter** 键或 **搜索** 图标。


如果想要为某位患者输入一些新信息，患者列表将搜索与新条目信息相匹配的患者，然后相应地更新存储在所选患者上的信息。如果有多位患者要应用这些新信息，请务必选择正确的患者。然后，更新的信息将显示在患者信息部分中。

要再次查看完整的患者列表，请点击搜索图标位置出现的叉号 。




要对患者执行高级搜索，请单击搜索字段，然后会出现一个下拉箭头 。点击此箭头按钮将显示一个列表，您可以从中选择高级搜索条件。




选中项目后，该项目旁边会出现一个勾号，然后此搜索项目将显示在搜索字段下方。现在可以编辑该字段或通过选择它旁边的叉号  取消选择该字段。


要创建新患者，请点击患者列表上方的添加按钮  以打开一个空白患者信息界面。

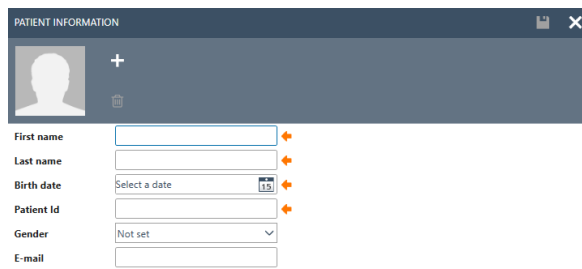



这个新患者界面包括患者照片、患者一般信息以及一些额外的字段。照片下方的区域包含可添加到患者的其他信息。

设置中可以自定义这两个区域（一般和其他信息数据）。有关设置这些字段的说明，请参阅管理工具文档。

要添加患者照片，请选择添加按钮 。这会打开一个弹出文件选择框，您可以从中选择要上传的照片。您也可以将照片拖放到此区域。照片的大小和质量会自动调整。

要删除照片，请选择删除按钮 。

输入完所有数据后，保存按钮  将被激活，输入的数据可以保存在数据库中。要放弃任何更改，请选择取消按钮 。

根据设置（请参阅管理文档），患者 ID 可能必须是唯一 ID。

Patient Id 

对于新输入 ID 在系统中已存在，将出现一个红色叉号，而不是箭头，同时 ID 字段周围也将出现一个红色框。

6.1.4 患者搜索

OtoAccess 数据库具有多种搜索方法，可满足不同的管理要求。可在默认首选项下的管理工具中设置搜索选项。需要重新启动 OtoAccess 数据库应用程序才能使更改生效。

注意：无论进行何种设置，在选择患者时，该患者均将出现在患者列表中，直到主动选择另一名患者。

注意：搜索不区分大小写。



Improved patient privacy


Exact match

Minimum search characters

在默认首选项下的 Administrator（管理员）工具中进行设置。


<p>默认设置 — 一开始就会填充患者列表</p>	<p>与以前的 2.x 版 OtoAccess 数据库相比，操作方式上没有变化。</p> <p>患者列表完全可见，在搜索字段中键入第一个字符即可开始搜索。</p>  <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">First name</th> <th style="width: 33%;">Last name</th> <th style="width: 33%;">Birth da</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Joel</td> <td>Bourne</td> <td>02/06/1990</td> </tr> <tr> <td>Joe</td> <td>Dawidson</td> <td>28/12/2022</td> </tr> <tr> <td>Joe</td> <td>Dawidson</td> <td>27/12/2022</td> </tr> <tr> <td>Joe</td> <td>Hansson</td> <td>01/11/2022</td> </tr> </tbody> </table>	First name	Last name	Birth da	Joel	Bourne	02/06/1990	Joe	Dawidson	28/12/2022	Joe	Dawidson	27/12/2022	Joe	Hansson	01/11/2022
First name	Last name	Birth da														
Joel	Bourne	02/06/1990														
Joe	Dawidson	28/12/2022														
Joe	Dawidson	27/12/2022														
Joe	Hansson	01/11/2022														
<p>完全匹配 — 患者列表在开始时为空</p>	<p>强制执行严格的患者匹配，只有在搜索结果减少到一位匹配患者时才显示患者信息。</p> <p>将显示搜索到的患者人数。使用扩展的患者搜索功能来缩小结果范围。</p> 															
<p>最少搜索字符数 — 开始时患者列表为空</p>	<p>最少字符数将决定何时显示结果。例如，如果将该值设置为四个字符，则在您输入第四个字符时开始显示结果，如果患者姓名不足四个字符，将不显示结果，但如果满足搜索要求，则在匹配时显示结果。</p> <p>在下面的示例中，将“最少搜索字符数”设置为“4”。</p>															



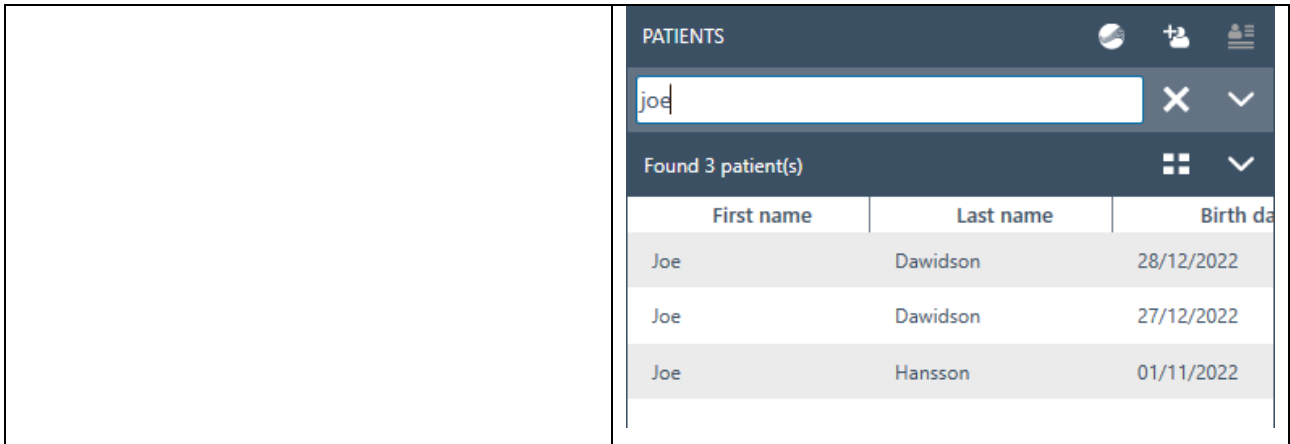


6.1.4.1 扩展的患者搜索功能

OtoAccess Database 具有扩展搜索功能。添加专用搜索字段可以缩小搜索范围。开始搜索时，所选的搜索字段将自动出现。

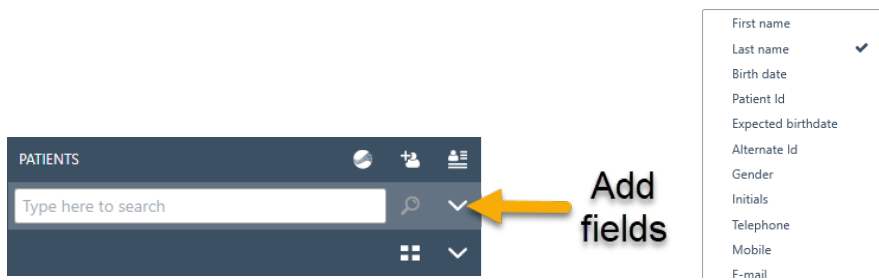


选择相关搜索字段。

例如，启用“Exact match（完全匹配）”设置：
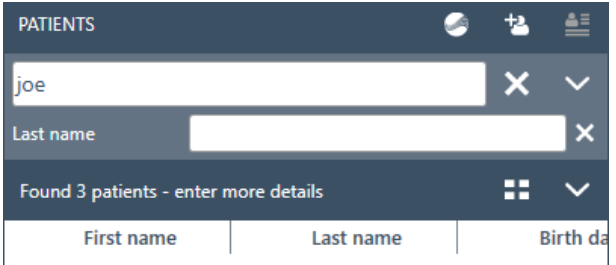
<p>搜索“Joe”</p>	<p>搜索结果太多。将自动显示预先添加的搜索字段“Last name（姓氏）”。也可以添加其他搜索字段。</p> 
<p>在姓氏字段中添加“Hansson”</p>	<p>发现并仅显示一名患者</p>

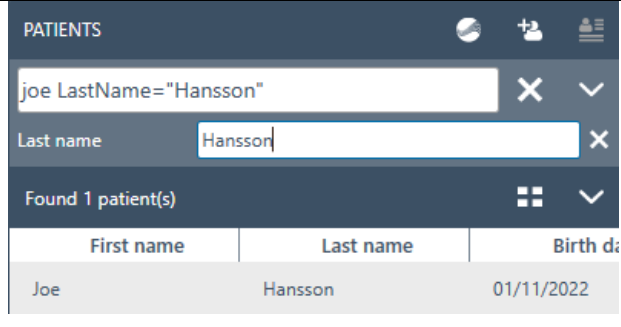

	 <p>The screenshot shows the 'PATIENTS' search interface. The search bar contains 'joe LastName="Hansson"'. Below it, a filter for 'Last name' is set to 'Hansson'. The results section shows 'Found 1 patient(s)'. A table below displays the search results:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>First name</th> <th>Last name</th> <th>Birth date</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Joe</td> <td>Hansson</td> <td>01/11/2022</td> </tr> </tbody> </table>	First name	Last name	Birth date	Joe	Hansson	01/11/2022
First name	Last name	Birth date					
Joe	Hansson	01/11/2022					

6.1.4.2 使用语法搜索

使用添加的搜索字段时将显示主搜索字段中使用的语法。除下列示例外，还具有更多字段和组合。

患者示例




名字: Joe

姓氏: Hansson

城市: 哥本哈根

母亲姓名: Debbie Hansson

在主搜索字段中输入的结果
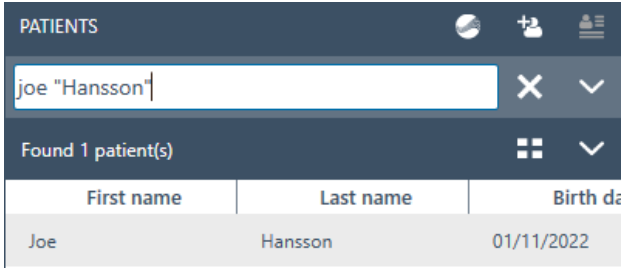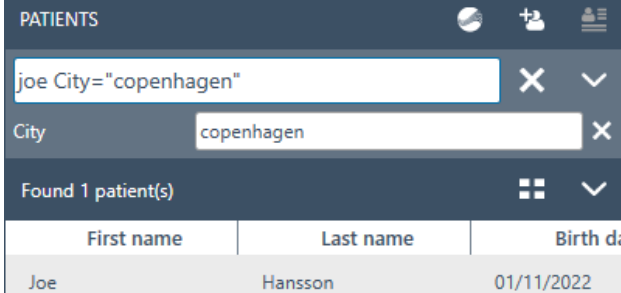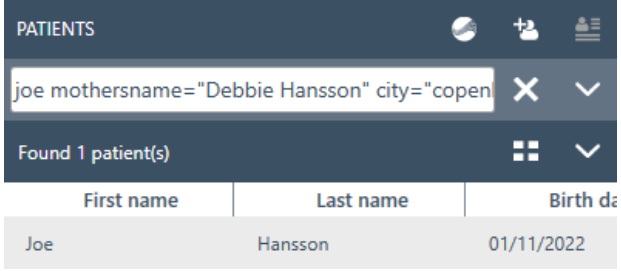
<p>Joe "Hansson"</p>	<p>成功搜索到了患者。</p>  <p>The screenshot shows the 'PATIENTS' search interface. The search bar contains 'joe "Hansson"'. Below it, a filter for 'City' is set to 'copenhagen'. The results section shows 'Found 1 patient(s)'. A table below displays the search results:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>First name</th> <th>Last name</th> <th>Birth date</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Joe</td> <td>Hansson</td> <td>01/11/2022</td> </tr> </tbody> </table>	First name	Last name	Birth date	Joe	Hansson	01/11/2022
First name	Last name	Birth date					
Joe	Hansson	01/11/2022					
<p>Joe City=" Copenhagen"</p>	<p>成功搜索到了患者。</p>  <p>The screenshot shows the 'PATIENTS' search interface. The search bar contains 'joe City="copenhagen"'. Below it, a filter for 'City' is set to 'copenhagen'. The results section shows 'Found 1 patient(s)'. A table below displays the search results:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>First name</th> <th>Last name</th> <th>Birth date</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Joe</td> <td>Hansson</td> <td>01/11/2022</td> </tr> </tbody> </table>	First name	Last name	Birth date	Joe	Hansson	01/11/2022
First name	Last name	Birth date					
Joe	Hansson	01/11/2022					
<p>joe mothersname="Debbie Hansson" city="copenhagen"</p>	<p>成功搜索到了患者。</p>  <p>The screenshot shows the 'PATIENTS' search interface. The search bar contains 'joe mothersname="Debbie Hansson" city="copenhagen"'. Below it, a filter for 'City' is set to 'copenhagen'. The results section shows 'Found 1 patient(s)'. A table below displays the search results:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>First name</th> <th>Last name</th> <th>Birth date</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Joe</td> <td>Hansson</td> <td>01/11/2022</td> </tr> </tbody> </table>	First name	Last name	Birth date	Joe	Hansson	01/11/2022
First name	Last name	Birth date					
Joe	Hansson	01/11/2022					



6.1.5 患者信息

患者信息显示了患者的详细信息。在此视图中，您可以编辑（1）、删除（2）或添加有关患者的备注（3）。要添加备注，必须先选择编辑图标。

PATIENT INFORMATION
✎ ✖

Steve Nilsson
27-07-1997
270997-1219

Gender Male


E-mail support@otoaccess.com

▲ ADDITIONAL INFORMATION

Telephone +4563713636	Country Denmark
Physician Dr. Demant	Create date 14-01-2019 09:59
Zip code 5500	Update date 05-02-2019 08:50
City Middelfart	

6.1.6 会话预览

从患者列表中，单击切换按钮 以在患者信息和会话预览之间切换。会话预览可直接在 OtoAccess® Database 中显示预览和有关会话的信息，而无需打开相应的模块。

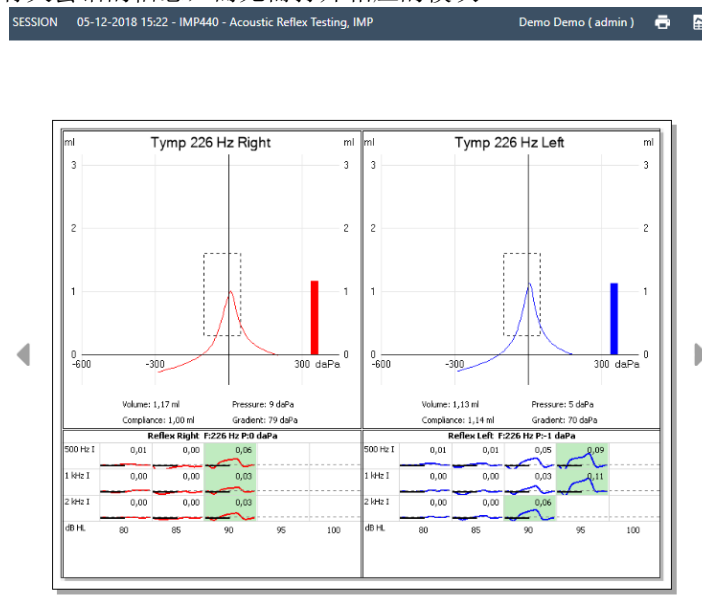

信息： 根据模块制造商的不同，某些模块可能不支持预览功能。



6.1.7 会话列表

在患者信息和测试结果预览的右侧，有一个会话列表，其中包含所选患者的所有可用测试。


Session name	Create date
IMP440 - Tympanometry 226H...	22-09-2016 11:30
Demo DPOAE	20-09-2016 09:46

从此处单击将在 OtoAccess® Database 中显示所选会话的预览。双击将在测量模块中打开会话。

	<p>列表视图以列表格式显示所有会话。</p> <p>Session name Create date</p>														
	<p>组合视图将在一个字段而不是一个列中显示所有项目。</p> <p>Combined view</p> <table border="1"> <tr><td>Session name</td><td>IMP440 - Acoustic Reflex Testing</td></tr> <tr><td>Create date</td><td>05-12-2018 15:22</td></tr> <tr><td>First name</td><td>Demo</td></tr> <tr><td>Last name</td><td>Demo</td></tr> <tr><td>Update date</td><td>03-01-2019 13:48</td></tr> <tr><td>Examiner</td><td>Admin</td></tr> <tr><td>Module</td><td>IMP</td></tr> </table>	Session name	IMP440 - Acoustic Reflex Testing	Create date	05-12-2018 15:22	First name	Demo	Last name	Demo	Update date	03-01-2019 13:48	Examiner	Admin	Module	IMP
Session name	IMP440 - Acoustic Reflex Testing														
Create date	05-12-2018 15:22														
First name	Demo														
Last name	Demo														
Update date	03-01-2019 13:48														
Examiner	Admin														
Module	IMP														
	<p>要查看测量模块中的测试，请选择相关会话，然后单击查看图标以打开相应的模块。</p>														
	<p>移动图标可将选定的测试移动至另一位患者。可以选择多个会话（最多 5 个）。一旦按下移动按钮，会话列表就会切换到患者列表，以便选择目标患者。可以使用搜索来查找目标患者。选择目标患者并再次点击移动图标  或选择取消按钮  以停止该过程。</p>														
	<p>要删除当前选定的测量值（最多 5 个），请单击删除按钮。</p>														










6.1.8 描述


在说明框中，可以添加有关测量的注释。选择编辑按钮  输入说明。选择编辑按钮会显示一个工具箱。



下表描述了可用于修改文本的不同功能。选择保存图标  可以保存编辑和更改，选择取消图标  可以退出编辑。

	剪切
	复制
	粘贴
	撤消和恢复上一次操作
	粗体、斜体和下划线
	放大缩小字体
	段落对齐

6.1.9 激活许可证

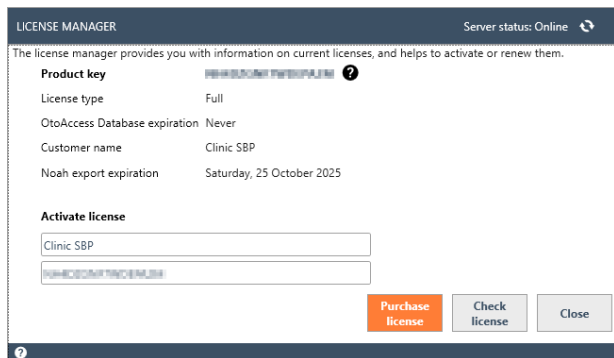

可证的 Noah 导出并购买 OtoAccess 数据库许可证。

选择 **License (许可证)** 将显示许可证管理器，您可以在其中查看当前有效的许可证和/或激活新的许可证密钥。输入新密钥后，选择 **Activate License (激活许可证)** 可验证密钥并激活许可证。


如果有效许可证处于活动状态，**Activate License (激活许可证)** 按钮将显示 **Check license (查看许可证)**，使您可以查看许可证状态并激活更新的功能。

Purchase license (购买许可证) 可将您导至 OtoAccess.com 网站，您可以在该网站上启用有关许




6.2 OtoAccess® Database 管理

安装 OtoAccess® Database 还会安装 OtoAccess® Database 管理工具。该工具可自定义 OtoAccess® Database 的多个设置。

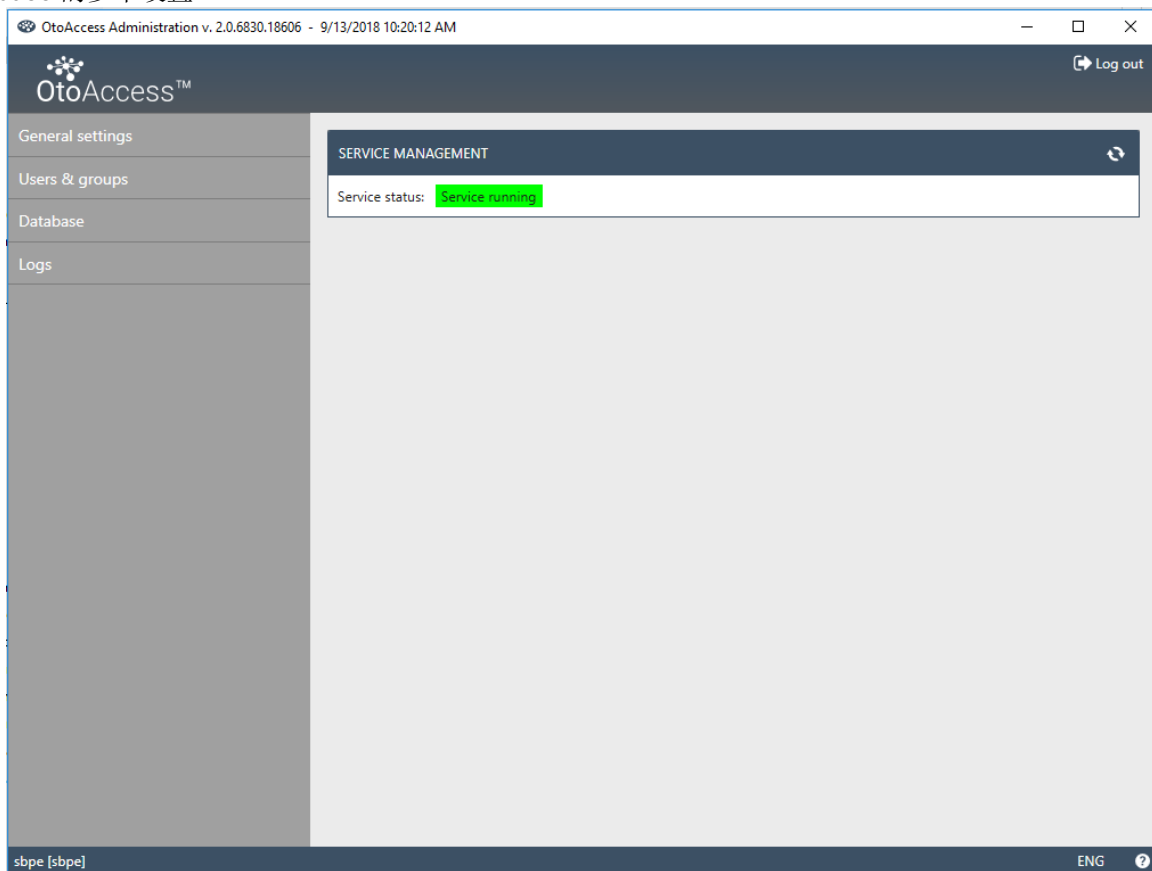

可编辑的设置包括关于患者数据库中用户首选项的一般设置、用户管理以及查看和管理日志文件的选项。

General settings	一般设置： 有关患者数据库和贵机构中用户首选项的所有设置。
Users & groups	用户和组： 有关用户管理和用户身份验证的所有设置。
Database	数据库： 有关数据库和备份功能的一般信息和设置。
Logs	日志： 设置和查看所有可用的日志文件。

帮助图标  位于菜单栏中。选择此按钮可打开手册。

在信息栏的最右侧，您可以更改语言。选择缩写 **ENG** 可显示选项的下拉列表。如果选择新语言，则需要重新启动 OtoAccess® Database 以使语言更改生效。

信息： 如果在 OtoAccess® Database 管理工具中更改了语言，则 OtoAccess® Database 中的语言将自动发生更改。







6.2.1 一般设置

一般设置提供了自定义 ATLAS 数据库的选项。

General settings	机构信息: 输入有关贵机构的数据。
Facility information	服务管理: 检查连接到数据库的服务的状态，如果存在连接问题，可能会重新启动服务。
Service management	
Default preferences	默认首选项: 设置患者数据库的默认值。
Patient fields	患者字段: 定义数据库中主字段和辅助字段的顺序首选项。
User-defined patient fields	用户自定义的患者字段: 最多可添加七个用户自定义字段。 -

6.2.1.1 设备信息

<div style="background-color: #333; color: white; padding: 5px; font-weight: bold;">FACILITY INFORMATION</div>  <p>Name Test Clinic</p> <p>Address Audiometer Allé 1</p> <p>Address 2</p> <p>Zip code 5500</p> <p>City Middelfart</p>	<p>使用编辑按钮可编辑设备数据。</p> <p>选择标题图片或添加图标  可添加标志。选择垃圾桶图标  可删除标志。</p> <p>输入机构的所有必填数据后，选择右上角的保存图标  保存您编辑的内容。</p>
---	--

6.2.1.2 服务管理

显示了 OtoAccess® Database 服务状态。



<div style="background-color: #2c3e50; color: white; padding: 5px; text-align: center; font-weight: bold;">SERVICE MANAGEMENT</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin-top: 5px;"> <p>Service status: Service running</p> </div>	<p>服务状态: 这将显示 <i>服务正在运行</i>、<i>等待启动</i>或<i>服务已停止</i></p> <div style="text-align: center; margin: 10px 0;">  </div> <p>重启按钮  可停止并重新启动服务。</p> <p><i>服务正在运行</i>状态对于正常的 OtoAccess® Database 操作至关重要。</p>
--	--

6.2.1.3 默认首选项

患者设置可为患者数据库设置一些常规设置。对设置的更改会自动保存。

<div style="background-color: #2c3e50; color: white; padding: 5px; text-align: center; font-weight: bold;">DEFAULT PREFERENCES</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin-top: 5px;"> <p>Default patient country (System default) ▼</p> <p><input type="checkbox"/> Show birth time</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Impose unique patient Id</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Allow usage statistics</p> </div>	<p>默认患者国家/地区: 为新创建的患者设置默认国家/地区。</p> <p>显示出生时间: 显示出生时间。您可以选择是否在患者视图中显示出生时间（仅适用于婴儿）。</p> <p>强制使用唯一的患者 ID: 将强制使用唯一的患者 ID。然后，不能有两名具有相同 ID 的患者。</p>
	<p>允许统计使用情况: 允许匿名记录软件的使用情况。此日志记录有助于提高软件的可用性和工作流程。请注意，这不会记录患者和机构信息。</p>

6.2.1.4 加强保护患者隐私

OtoAccess 数据库有一个选项，可用于在界面下方的 OtoAccess 数据库中强制加强保护患者隐私。

如果启用这些选项，OtoAccess 中的患者列表将默认为空，除非满足搜索条件，否则不会显示任何患者。

为加强保护隐私所做的更改将影响所有 OtoAccess 数据库客户端的设置，且这些更改将在登录 OtoAccess 数据库客户端后生效。

<p>Improved patient privacy</p> <p><input type="checkbox"/> Exact match</p>	<p>标准设置: 如果未更改以下设置，OtoAccess 将显示完整的患者列表。</p>
<p>Minimum search characters <input style="width: 40px; text-align: center;" type="text" value="0"/></p>	<p>完全匹配: 患者列表为空，并强制执行严格的患者匹配。如要选择患者，需先进行搜索。搜索时，一</p>




	<p>次只会显示一名患者。 如果找到多名患者，将不会显示任何患者，但应用程序会提醒您缩小搜索范围。</p> <p>最少搜索字符：患者列表为空，需要输入搜索字符才能显示患者。 对显示的患者人数没有限制。 即便未达到确保搜索结果是短姓名的字符数要求，也仍然会显示搜索结果。</p>
--	---

有关搜索功能的详细信息，请参阅“Patient search（患者搜索）”。

6.2.1.5 患者字段



选择**患者字段**选项卡可定义 OtoAccess® Database 患者数据库中显示的信息。有两个首选项列表：左边一个是患者信息，右边一个是附加信息。

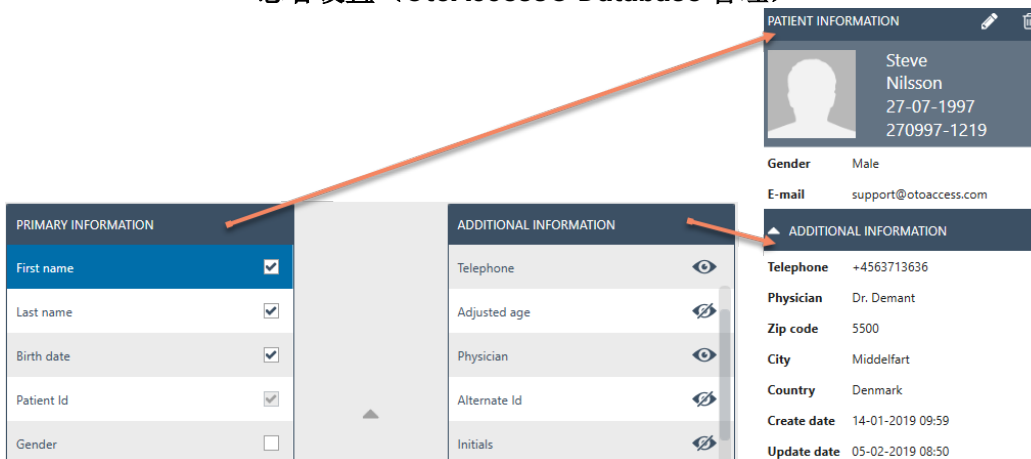
患者设置（OtoAccess® Database 管理）



使用向左和向右箭头可将项目从一个首选项列表移动到另一个首选项列表。您可以使用向上和向下箭头排列列表中项目的顺序。


患者信息表必须始终包含至少一个项目，最多不超过 10 个。使用每个项目旁边的复选框确定哪些字段是必填字段。

眼睛图标显示了信息是对用户可见  还是对用户隐藏 .

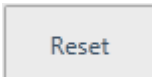	<p>选择重置按钮可将主字段和辅助字段恢复为出厂默认设置。</p>
---	-----------------------------------




6.2.1.6 用户自定义的患者字段

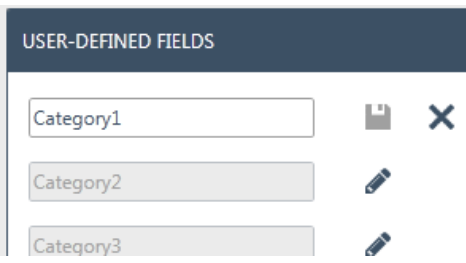	<p>您最多可以创建七个用户自定义的字段用于数据库。选择编辑按钮可编辑字段。选择保存图标可以保存更改，选择取消按钮可以退出编辑。</p> <hr/> <p>信息： 用户自定义字段仅为文本字段。</p>
---	---


6.2.2 用户和组

用户管理由用户和组选项卡控制。

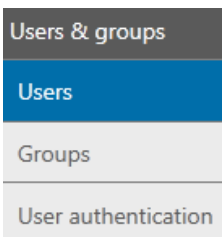	<p>用户： 管理当前用户并根据需要添加新用户。</p>
	<p>组： 管理用户组和不同的组权限。</p>
	<p>用户身份验证： 管理与登录相关的设置。</p>

6.2.2.1 用户

管理用户选项卡提供了所有可用用户的列表。

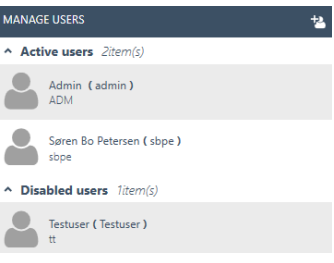	<p>该列表包含现有和被禁用的用户。从列表选中一位用户时，将显示有关该用户的其他信息。选中一位患者时，还会显示编辑？图标和删除？图标按钮。</p>
---	---



要添加一位新用户，请选择右上角的添加 。将出现一个新的用户屏幕。



您可以在其中添加新的用户详细信息。用户名、密码、姓名和缩写都是必填字段，以橙色箭头突出显示。您必须先完成每个字段，然后才能保存数据。



启用**启用用户**复选标记来激活用户。默认情况下已启用此字段。选择 **Additional information** 添加有关用户的更多信息。


您可以将用户添加到任意组。将用户分配给至少一个组以应用权限级别是非常重要的。

输入完所有数据后，保存按钮  将被激活，输入的数据可以保存在数据库中。要放弃任何更改，请选择取消按钮 。


6.2.2.2 组

管理组选项卡提供了所有可用组的列表。

	<p>从列表中选中一个组时，将显示有关该组的其他信息。选中一个组时，还会显示编辑  和删除  按钮。</p> <p>有 3 个系统定义的组：管理员、检查员和观察员</p>
--	---

要添加一个新组，请选择右上角的添加 。将出现一个创建新组的界面



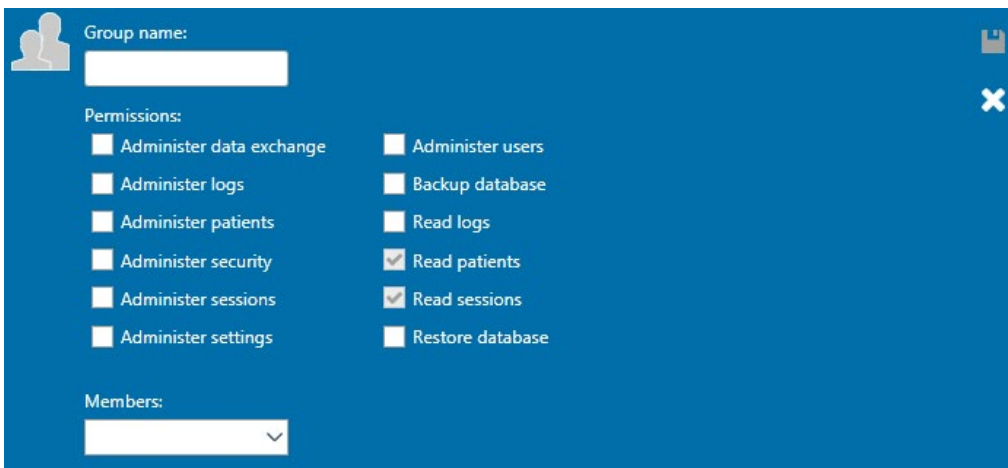

Group name:

Permissions:



<input type="checkbox"/> Administer data exchange	<input type="checkbox"/> Administer users
<input type="checkbox"/> Administer logs	<input type="checkbox"/> Backup database
<input type="checkbox"/> Administer patients	<input type="checkbox"/> Read logs
<input type="checkbox"/> Administer security	<input checked="" type="checkbox"/> Read patients
<input type="checkbox"/> Administer sessions	<input checked="" type="checkbox"/> Read sessions
<input type="checkbox"/> Administer settings	<input type="checkbox"/> Restore database

Members:

首先，为小组命名。然后，您可以为该组分配关于组成员如何操作 **OtoAccess® Database** 的权限。唯一的必填字段（组名称）以橙色箭头突出显示。您必须先填写这一字段，然后才能保存数据。

然后，通过启用所需列表项前面的复选标记，选择分配给组的权限。*读取患者*和*读取会话*始终被激活。

此外，您可以通过成员下拉框将用户分配到该组。这也可以通过用户设置进行（有关详细信息，请参阅用户 6.2.2.1 章节）。

输入完所有数据后，保存按钮  将被激活，输入的数据可以保存在数据库中。要放弃任何更改，请选择取消按钮 。



6.2.2.3 用户身份验证

用户身份验证用于设置用户登录的设置。

<div style="text-align: center;">T</div> <div style="background-color: #2c3e50; color: white; padding: 5px; text-align: center;">USER AUTHENTICATION</div> <p><input type="checkbox"/> Use Windows logon if available</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Show list of users at logon</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Password authentication required at logon</p> <p>Number of logon attempts before account is locked: <input type="text" value="3"/></p> <p>Time to lock account: <input type="text" value="10 minutes"/></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Allow users to change password</p> <p style="margin-left: 20px;"><input type="checkbox"/> Enforce password strength</p> <p>Expiration time: <input type="text" value="Never"/></p>	<p>允许用户更改密码： 启用此复选标记将允许用户更改其密码。</p> <p>可以加强密码强度。新密码必须至少包含六个字符，并包含大写字母和数字。设置密码的过期时间将要求用户以预定的时间间隔更改密码。</p> <p>帐户锁定前的登录尝试次数： 设置用户输入有效密码的尝试次数。继续尝试将锁定帐户。</p> <p>解锁帐户的时间： 您可以设置当帐户被锁定后用户在能够再次登录之前必须等待的时间。</p> <p>登录时显示用户列表： 启用此复选标记将在登录屏幕中显示所有可用用户的列表。您可以从此列表中选择用户。如果未选中，则必须手动输入用户名。</p> <p>登录时需要密码验证： 如果启用了显示用户列表的选项，允许登录而不设置密码的选项也会被启用。</p> <p>如果可用，使用 Windows 登录： 使用户能够根据 Windows 登录自动登录。需要正确设置用户部分中用户的 Windows 登录字段，才能使其正常工作。</p> <p>要使用 Microsoft Active Directory 作为身份验证模式，必须选中“使用 Windows 登录（如果可用）”设置。参见第 6.2.2.4 节。</p>
--	--

6.2.2.4 Microsoft Active Directory

从 OtoAccess® Database v2.4 开始，Microsoft Active Directory (AD) 可用于创建和验证用户。

OtoAccess® Database 将检查 AD 组和用户，并相应地添加、激活或停用用户。

AD 和 OtoAccess® Database 中的组必须是一致的，并且 OtoAccess® 用户身份验证下的“用户 Windows 登录（如果可用）”选项必须被启用。

例如：

创建三个分别名为“OtoAccess® 检查员”、“OtoAccess® 只读”和“OtoAccess® 管理员”的 AD 组，并在每个组中添加相关用户。

然后，在 OtoAccess® Database 管理员工具中，用完全相同的命名和相关权限创建三个相同的组。

现在，当 AD 用户在工作站上打开 OtoAccess® Database 客户端或管理员工具时，将根据 OtoAccess® 中分配的权限对用户进行验证。



如果用户在 AD 中被删除、被换到另一个组或被停用，这将在用户下次登录 OtoAccess® Database 时反映出来。

6.2.3 数据库

在数据库设置中，可以查看服务器名称、产品名称等一般信息。也可以从此部分管理备份。

Database	信息： 包含常规数据库和备份信息。
Information	连接： 服务器的连接设置。
Connection	备份和时间设置： 定义执行备份时的备份位置和时间范围。
Backup & scheduling	
Restore	恢复： 从备份数据恢复数据库。


6.2.3.1 信息



在此选项卡中，您可以找到服务器名称、产品名称、数据库版本、语言和已用空间等一般信息。

6.2.3.2 连接

连接设置：





<p>DATABASE CONNECTION</p> <p>Select or enter a server name:</p> <p>.\DGS </p> <p>Enter logon information:</p> <p><input checked="" type="radio"/> Use default credentials</p> <p><input type="radio"/> Use Windows integrated security</p> <p><input type="radio"/> Enter a specific username and password</p> <p>Username: atlas_user</p> <p>Password:</p> <p>Select the name of the database:</p> <p>ATLAS</p>	<p>服务器名称:</p> <p>输入服务器名称或从下拉列表中选择。点击刷新按钮加载可用服务器列表。</p> <p>格式为 [DNS 名称或 IP][实例名称]</p> <p>默认为: “.\DGS”。</p>
	<p>登录信息:</p> <p>设置默认凭证将使用安装系统时创建的本机 SQL 凭证。</p> <p>选择 Windows 凭证将使用每个用户的域和 Windows 用户凭证登录到 SQL Server。此选项要求将 Windows 用户映射到 SQL Server。</p> <p>如果需要特殊凭证才能访问服务器，请输入特定的用户名和密码。</p>
	<p>数据库名称:</p> <p>选择数据库的名称。默认为“ATLAS”。</p>

要测试连接设置，请选择右上角的测试连接按钮 。要保存所有更改，请单击保存图标 。


6.2.3.3 备份和时间设置

OtoAccess® Database 管理工具可定期执行备份。

信息: 备份文件始终包括患者数据库和设置。

BACKUP AND SCHEDULING  

Backup location:

c:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL11.DGS\MSSQL\Backup 

Remove files older than:

1 months

Automatic backup




Schedule

Daily

Weekly

Monthly

Start time:


17.10.2016 15 12 : 00 : 00   

Recur every: 1 days






“Select Folder（选择文件夹）”视图支持 UNC 直接输入路径。

首先，选择存储备份的位置。然后，您可以通过启用 *删除早于预选时间的文件* 来设置删除旧备份的时间：


要自动存储备份，请启用 *自动备份* 复选框。您还可以设置执行这些备份的时间范围。要手动进行备份，请选择立即备份图标 。成功备份的确认显示在帮助图标旁边的左下角。

6.2.3.4 恢复

要恢复数据库，请使用打开图标  选择备份文件的位置。该位置显示在打开图标的后面。要启动恢复功能，请单击右上角的恢复图标 。

RESTORE


IMPORTANT: Restoring the database will delete the current database and restore it with data from the selected backup.

 C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL11.DGS\MSSQL\Backup\atlas_20150731134258.bak

信息： 恢复数据库将删除当前数据库并使用所选备份中的数据进行恢复。

6.2.3.5 日志

在日志设置中，您可以找到所有可用的日志条目。

<div style="background-color: #2c3e50; color: white; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Logs</div> <div style="background-color: #0072bc; color: white; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Security log</div> <div style="background-color: #95a5a6; color: white; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">System log</div> <div style="background-color: #95a5a6; color: white; padding: 5px;">Log retention policy</div>	<p>安全日志： 提供了有关患者数据库更改的信息。</p> <hr/> <p>系统日志： 提供了与调试 OtoAccess® Database 的任何错误/问题相关的信息。</p> <hr/> <p>日志保留策略： 定义了保留日志的时间以及何时运行脚本来清理日志。</p>
---	---

6.2.3.6 安全日志




安全日志显示了哪个用户执行了操作以及何时执行了操作。



<p>SECURITY LOG</p>	<p> 刷新: 可刷新日志信息。</p>																
<p>Showing 20 of 1148 log entries.</p>	<p> 保存日志: 可导出日志。</p>																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Id</th> <th>Date and Time</th> <th>User</th> <th>Action</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>13156</td> <td>10-12-2018 12:42</td> <td></td> <td>Upda</td> </tr> <tr> <td>13157</td> <td>10-12-2018 12:42</td> <td></td> <td>Upda</td> </tr> <tr> <td>13155</td> <td>10-12-2018 12:00</td> <td></td> <td>Creat</td> </tr> </tbody> </table>	Id	Date and Time	User	Action	13156	10-12-2018 12:42		Upda	13157	10-12-2018 12:42		Upda	13155	10-12-2018 12:00		Creat	<p> 清除日志: 可擦除所有日志条目。</p>
Id	Date and Time	User	Action														
13156	10-12-2018 12:42		Upda														
13157	10-12-2018 12:42		Upda														
13155	10-12-2018 12:00		Creat														

6.2.3.7 系统日志


系统日志显示了 OtoAccess® Database 相关应用程序记录的事件。这些信息也可以通过 ATLAS 名称下的 Windows 事件查看器进行查看。

<p>SYSTEM LOG</p>	<p> 刷新: 可刷新日志信息。</p>												
<p>Number of log entries: 2514 of 2514.</p>	<p> 保存日志: 可导出日志。</p>												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Id</th> <th>Source</th> <th>Date and Time</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2514</td> <td>OtoAccess Administration</td> <td>12/10/2018 12:00</td> </tr> <tr> <td>2513</td> <td>OtoAccess Administration</td> <td>12/10/2018 12:00</td> </tr> <tr> <td>2512</td> <td>OtoAccess Login</td> <td>12/10/2018 12:00</td> </tr> </tbody> </table>	Id	Source	Date and Time	2514	OtoAccess Administration	12/10/2018 12:00	2513	OtoAccess Administration	12/10/2018 12:00	2512	OtoAccess Login	12/10/2018 12:00	<p> 清除日志: 可擦除所有日志条目。</p>
Id	Source	Date and Time											
2514	OtoAccess Administration	12/10/2018 12:00											
2513	OtoAccess Administration	12/10/2018 12:00											
2512	OtoAccess Login	12/10/2018 12:00											



6.2.3.8 日志保留策略

日志保留策略将根据用户的选择将日志保存一段时间。默认为一个月。

<div style="background-color: #2c3e50; color: white; padding: 5px;">LOG RETENTION POLICY</div> <p><input checked="" type="checkbox"/> Remove entries older than:</p> <p>1 months</p> <p>Schedule</p> <p><input checked="" type="radio"/> Daily <input type="radio"/> Weekly <input type="radio"/> Monthly</p> <p>Start time: 10-12-2018 12 : 40 : 04</p> <p>Recur every: 1 days</p>	<p> 保存: 可保存政策。</p> <p>删除早于预选时间的条目: 将删除早于预选时间的文件。-这用于节省硬盘空间。</p>
---	--

7 Noah 导出

7.1 支持的 Noah 版本

OtoAccess Noah 导出功能与 4.9.2 及更高版本的 Noah 兼容。

7.2 功能

OtoAccess Noah 导出功能可将患者和测量数据从 OtoAccess 数据库传输到 Noah 数据库。

可以通过一个集成的简单工作流程，在 Noah 中创建新患者或将测量数据添加到现有患者。

该解决方案基于 HIMSA 提供的 Noah Mobile 服务。


7.3 Noah 导出许可证订阅

OtoAccess Noah

7.4 用户界面

从 2.3 版 OtoAccess 数据库开始，患者视图中将出现一个新图标。

有关安装和设置详情，请参阅第 7.X 章。


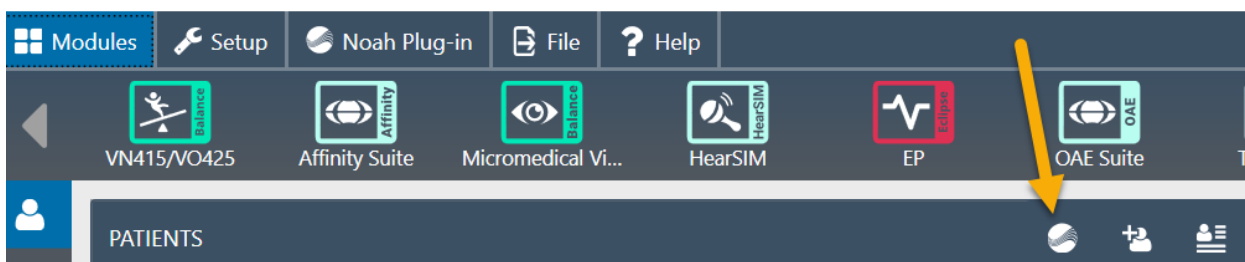


7.4.1 导出患者和测量数据

选择患者并按下图标将打开导出到 Noah 窗口。必须在此使用 Noah 凭据进行登录。

登录后，Noah 会请求通信权限，请点击 Grant（允许）继续。

这是 Noah 设定的要求，因此 OtoAccess 无法绕过。

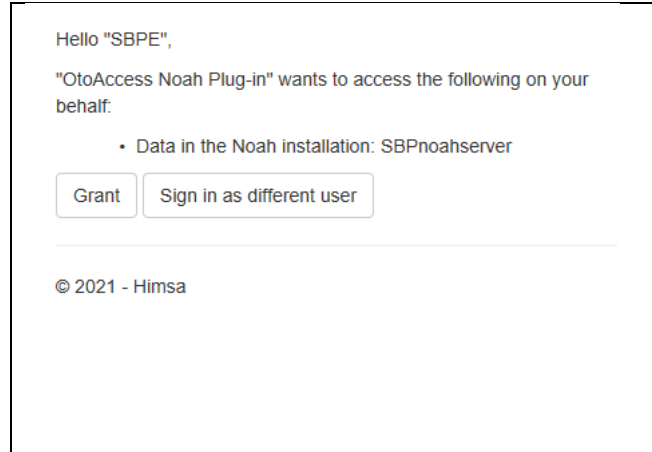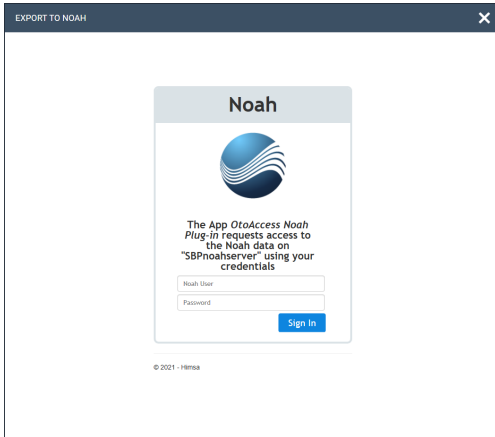

授予访问权限后，Noah 插件将询问是根据 OtoAccess 数据库中的信息在 Noah 中创建新患者，还是将测量数据添加到 Noah 中已有的患者。

7.4.1.1 自动查找患者的结果

使用从 OtoAccess 数据库中所选患者的姓名和患者 ID，在 Noah 中查找患者时可能会出现以下结果。


<p>名字、姓氏或患者 ID 不匹配。</p>	<p>将自动选择创建新患者。 因此将在 Noah 中创建患者。</p>
<p>与一个或多个名字、姓氏或患者 ID 匹配。</p>	<p>将自动选择现有目标患者。将显示更多潜在匹配。 用户必须选择正确的匹配或选择创建新患者。</p>



	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <div style="background-color: #4a697d; color: white; padding: 5px;"> OtoAccess patient Hansson, Hans 98764345675 10-06-2005 </div> <div style="margin-top: 10px;"> <p><input type="radio"/> Create new patient</p> <p><input checked="" type="radio"/> Target existing patient</p> </div> <div style="margin-top: 10px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> Noah patients <input style="width: 150px;" type="text" value="Hans Hansson"/> </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 0.8em;"> <thead> <tr style="background-color: #4a697d; color: white;"> <th>Client number</th> <th>Client ID</th> <th>Last name</th> <th>First name</th> </tr> </thead> <tbody> <tr style="background-color: #e0e0e0;"> <td>0000009</td> <td>9</td> <td>Hansson</td> <td>Phil</td> </tr> <tr> <td>0000012</td> <td>12</td> <td>Hansson</td> <td>Claire</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div>	Client number	Client ID	Last name	First name	0000009	9	Hansson	Phil	0000012	12	Hansson	Claire
Client number	Client ID	Last name	First name										
0000009	9	Hansson	Phil										
0000012	12	Hansson	Claire										
<p>存在 Noah 患者，但未自动匹配。出现这种情况的原因有多种，例如输入错误、更改姓名等。</p>	<p>用户可以在搜索字段中输入名字或姓氏，以在 Noah 数据库中查找患者。如果搜索字段为空，然后开始搜索，将显示整个 Noah 患者列表。</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <div style="background-color: #4a697d; color: white; padding: 5px;"> OtoAccess patient Hansson, Hans 98764345675 10-06-2005 </div> <div style="margin-top: 10px;"> <p><input type="radio"/> Create new patient</p> <p><input checked="" type="radio"/> Target existing patient</p> </div> <div style="margin-top: 10px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> Noah patients <input style="width: 150px;" type="text" value="peter"/> </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 0.8em;"> <thead> <tr style="background-color: #4a697d; color: white;"> <th>Client number</th> <th>Client ID</th> <th>Last name</th> <th>First name</th> </tr> </thead> <tbody> <tr style="background-color: #e0e0e0;"> <td>0000002</td> <td>2</td> <td>Petersen</td> <td>Peter</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div>	Client number	Client ID	Last name	First name	0000002	2	Petersen	Peter				
Client number	Client ID	Last name	First name										
0000002	2	Petersen	Peter										



7.4.1.2 将测量数据导出到 Noah

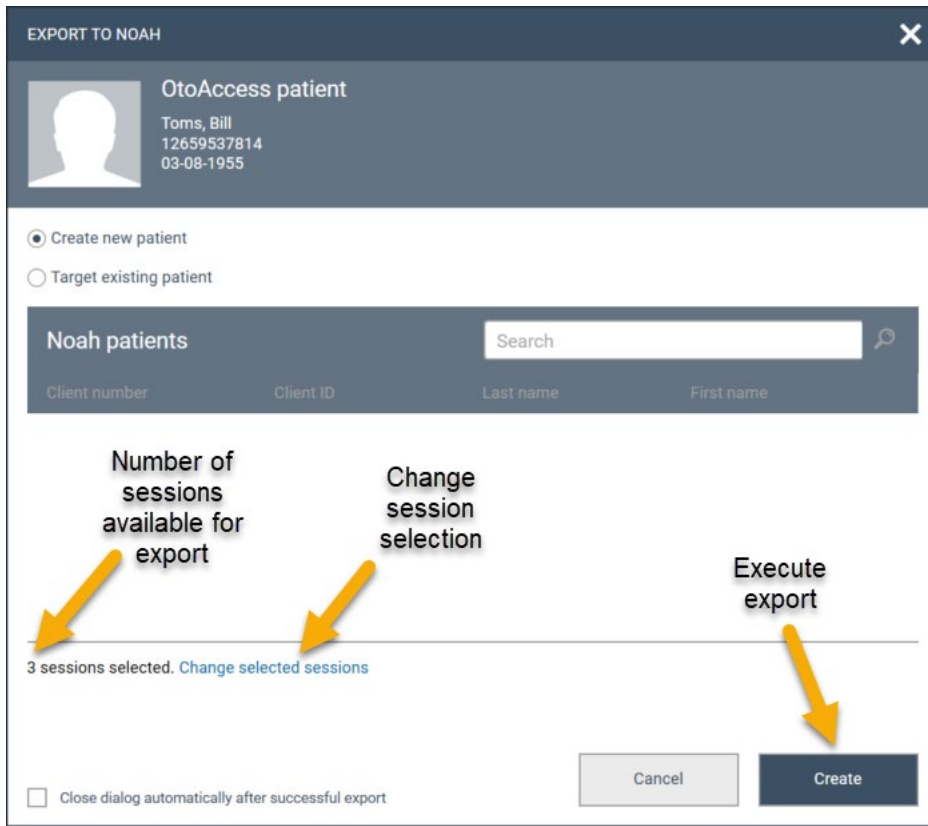






选择患者后，您可以选择以下选项。

<p>导出默认选定的测量会话。</p>	<p>支持的会话将自动存储在 Noah 中的患者中</p>	
<p>更改会话选择</p>	<p>只能导出勾选的会话。不支持的会话将显示为灰色。</p>	
<p>没有可用或受支持的会话。</p>	<p>如果 Noah 中已经存在该患者，则不会有任何改变。如果 Noah 中不存在该患者，则会创建患者。</p>	

导出后您将看到一个状态提示。

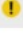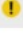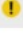

<p style="text-align: center;">Exporting</p> <p style="text-align: center;">  Complete </p> <p style="text-align: center;">  </p>	<p>没有问题，已成功导出患者和测量数据。</p>										
<p style="text-align: center;">Error</p> <p style="text-align: center;">  </p> <p style="text-align: center;">An error occurred while exporting selected sessions to Noah.</p> <table border="1" data-bbox="167 907 1066 985"> <thead> <tr> <th>Module</th> <th>Name</th> <th>Examiner</th> <th>Create date</th> <th>Update date</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dpoe</td> <td> DPOAE 440 - DP...</td> <td>Admin</td> <td>15-11-2018 11:57:52</td> <td>30-01-2019 10:44:13</td> </tr> </tbody> </table>	Module	Name	Examiner	Create date	Update date	Dpoe	 DPOAE 440 - DP...	Admin	15-11-2018 11:57:52	30-01-2019 10:44:13	<p>仅显示导出失败的会话。已成功导出其他所选的会话和未显示的患者数据。</p>
Module	Name	Examiner	Create date	Update date							
Dpoe	 DPOAE 440 - DP...	Admin	15-11-2018 11:57:52	30-01-2019 10:44:13							

现已完成导出。

7.5 安装和设置

2.3 版或更高版 OtoAccess®数据库软件包中将提供 Noah 导出功能。

更新到 2.3 版 OtoAccess 数据库后将可使用该功能，但需要将该功能添加到您的 OtoAccess 数据库许可证后才能使用。



7.5.1 在 OtoAccess®数据库客户端中激活 Noah

只能在您设置好 Noah 设置后进行此操作。请参见第 7.4.2 章节。


要在 OtoAccess®数据库客户端中激活 Noah 导出功能，必须打开 Noah 选项卡并选择 Register（注册）。

在注册窗口中，可能必须点击刷新图标才能找到网络中可用的 Noah 服务器。

Noah 有一个标准的 20 分钟注销时间，可以将该时段延长到 240 分钟。按延长时间图标或输入您需要的值。


点击注册后，将需要使用 Noah 凭据进行登录并许可访问权限。

您现在应该已注册成功，可以开始使用 Noah 插件了。

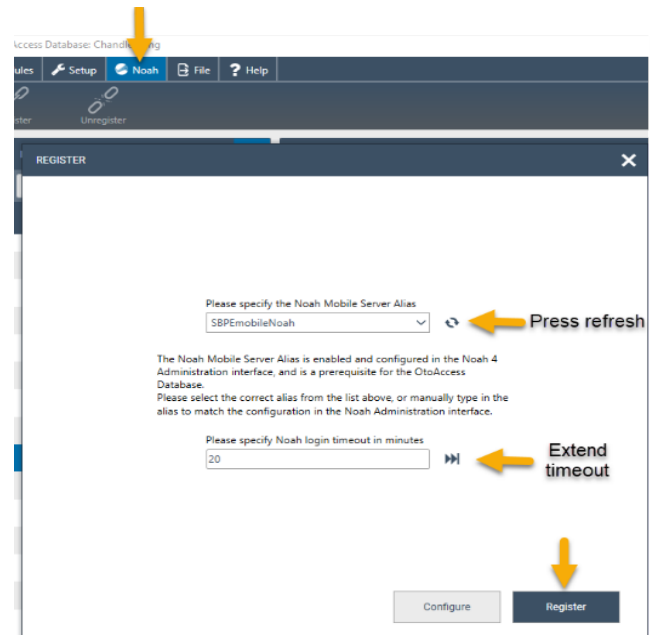

7.5.2 设置 Noah

打开 Noah 并转至 Setup（设置） - Administration（管理） - Noah Mobile。不同版本的 Noah 菜单会有所不同。以下示例采用 Noah 4.14.1 版本。

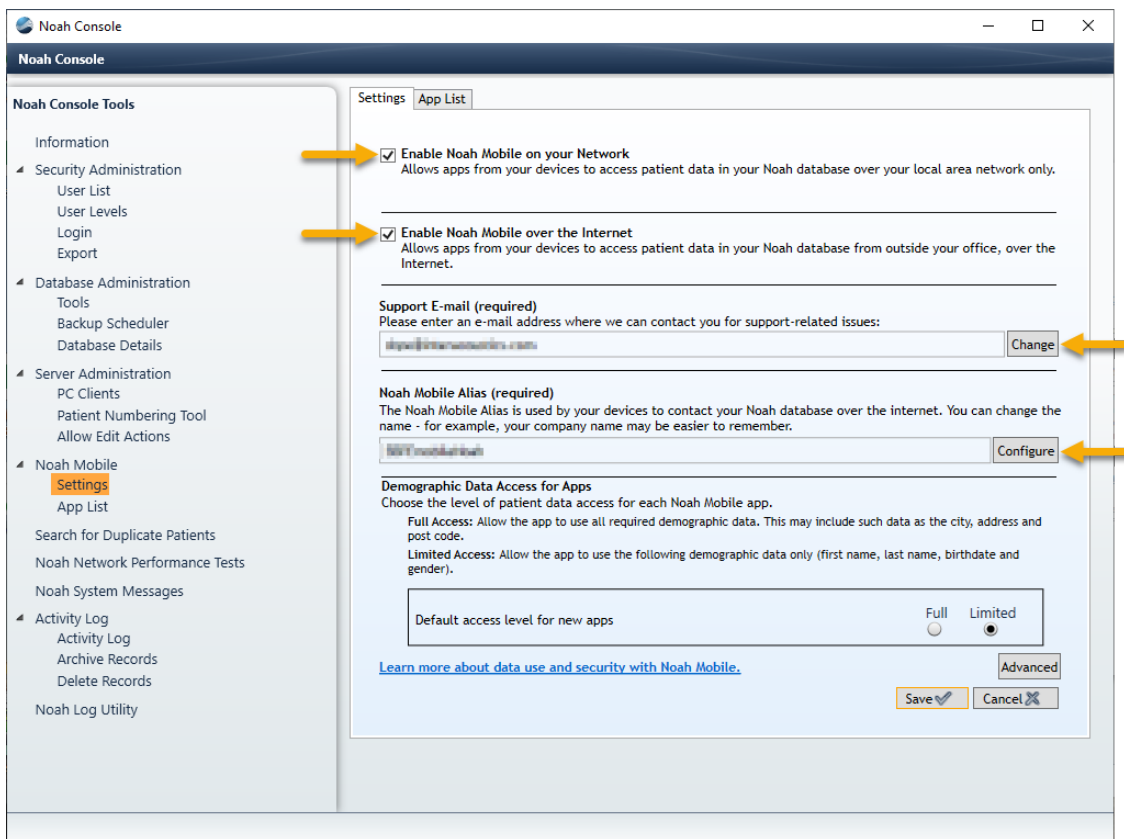

- 在您的网络中启用 Noah Mobile。
- 在互联网中启用 Noah Mobile
- 点击 **Change**（更改）可添加支持电子邮件地址，然后按照指南操作。
- 点击 **Configure**（配置）可创建一个 Noah Mobile 别名，然后输入名称并点击 **Add**（添加）。
 - 此别名是客户端将找到并注册的名称。
- 点击 **Save**（保存）
 - 将提示您填写您的信息并选择您所在的国家/地区。



您的 Noah 服务器现在已启用 Noah Mobile，您的 OtoAccess Noah 插件将能够在 OtoAccess 数据库客户端中注册。

7.5.2.1 Noah Mobile 网络基础设施要求

OtoAccess Noah 导出使用 Noah Mobile，这是一项由 HIMSA 在 Microsoft Azure 中创建和托管的服务。

4.9.2 及更高版本的 Noah 支持 Noah Mobile。基于 Noah Engine 的系统只有支持 Noah Engine，才能使用 OtoAccess Noah 导出。

由于 Noah Mobile 基于 Azure，因此必须获取访问权限。请在 HIMSA 网站上查找详细信息，或点击此链接 <https://www.himsa.com/support/noah-enterprise-support/noah-network-ports/>，了解网络要求。



8 故障排除

8.1 网络连接问题

如果在使用 OtoAccess® Database 期间出现任何问题，以下检查清单指出了您首先需要考虑的区域/采取的步骤：

- 检查互联网连接并验证连接是否正确
- 验证站点代码和制造商 ID 是否正确
- 验证服务器 URL 是否正确
- 检查安全程序（防火墙、反间谍软件、防病毒软件等）是否正在运行，它们可能阻止与 OtoAccess® Database 服务器的连接。
 - 如果您不确定计算机上是否正在运行任何安全程序，请与您当地的 IT 支持人员联系
- 验证服务器连接是否稳定和有响应。如果不稳定或未响应，请与相关 IT 人员联系

